


Guide des Groupes d'action

La fonction **Groupes d'action** d'AirView filtre vos patients en groupes distincts en fonction de certains critères. Cela vous aide à prendre en charge vos patients plus facilement en concentrant votre attention sur les patients qui ont besoin de votre aide. Les **Groupes d'action** peuvent être activés dans tout compte Airview de type traitement.

Les **Groupes d'action** vous permettent de prendre en charge votre population de patients plus efficacement. Les patients sont ajoutés / retirés d'un groupe en fonction de certains critères. De plus, vous pouvez exclure les patients de certaines catégories.

Pour y accéder, dans le menu **Patients**, sélectionnez **Groupes d'action**.


AirView™

Julien Physician
Déconnecter
? Aide

Patients
Entreprise
Mon profil
Administration

Patients

▼ Montrer uniquement...

Utilisateur: Tous les patients
Secteur: Tous les secteurs
Jours depuis appareillage: Tous les jours
Appliquer

18
Probl de traitement

14
Probl à l'utilisation

3
Aucune donnée reçue

6
Suivi du traitement en cours

4
Suivi de l'utilisation en cours

Groupes d'action

Les patients sont filtrés en listes distinctes en fonction de certains critères. Cliquez sur n'importe lequel de ces groupes pour consulter les données propres au traitement des patients au cours des 10 jours écoulés.

Nombre de patients

Indique le nombre de patients du groupe.

Description des règles

Passez par-dessus n'importe lequel de ces groupes pour qu'une brève description de la règle du groupe s'affiche.

Probl de traitement	Probl à l'utilisation	Aucune donnée reçue	Suivi du traitement en cours	Suivi de l'utilisation en cours
Identifie les patients auxquels une fuite du masque, un IAH ou un IAC plus élevé(e) qu'attendu a été associé(e) au cours des 30 premiers jours de leur traitement.	Identifie les patients qui ont eu tendance à peu utiliser leur dispositif au cours des 30 premiers jours de leur traitement.	Identifie les patients dont les données n'ont pas été transmises pendant 3 jours au cours des 30 premiers jours de leur traitement et pendant 10 jours par la suite.	Identifie les patients auxquels une fuite du masque, un IAH ou un IAC plus élevé(e) qu'attendu est associé(e) après les 30 premiers jours de leur traitement.	Identifie les patients qui ont eu tendance à peu utiliser leur dispositif après les 30 premiers jours de leur traitement.

Groupes d'action : règles d'ajout automatique

AirView ajoute automatiquement les patients aux groupes d'action lorsqu'ils répondent aux critères définis et les retire lorsqu'ils ne répondent plus à ces critères. Les patients peuvent également être retirés manuellement des groupes d'action. Veuillez vous reporter aux pages 5 et 6 pour plus de détails sur le retrait automatique et manuel.

Règles d'ajout automatique									
Les patients qui répondent à ces critères sont automatiquement ajoutés au groupe concerné									
		Probl de traitement: Fuite du masque, IAH et IAC			Probl à l'utilisation: < 3 heures*			Aucune donnée reçue	
AU COURS	Des 30 premiers jours	Probl de traitement			Probl à l'utilisation			Aucune donnée reçue	
		Critère	Seuil	Récurrence	Critère	Seuil	Récurrence		
		Fuite masque 95 %	> 24 L/min	5 jours d'affilée	Durée quotidienne d'utilisation	< 3 heures*	3 au cours des 7 premiers jours		
		et/ou...					5 au cours des 14 premiers jours		
		IAH	> 10 par heure	5 jours d'affilée			12 au cours des 21 premiers jours		
		et/ou...					14 au cours des 28 premiers jours		
IAC	> 5 par heure	5 jours sur 7							
		Traitement en cours			Utilisation en cours			Aucune donnée reçue	
APRÈS	Les 30 premiers jours	Critère	Seuil	Récurrence	Critère	Seuil	Récurrence	Aucune donnée reçue	3 jours d'affilée AU COURS des 30 premiers jours
		Fuite masque 95 %	>24 L/min	5 jours d'affilée	Durée quotidienne d'utilisation	< 3 heures*	5 jours d'affilée		15 jours d'affilée APRÈS les 30 premiers jours
		et/ou...							
		IAH	> 10 par heure	7 jours d'affilée					
		et/ou...							
		IAC	> 5 par heure	7 jours d'affilée					

AU COURS

Des 30
premiers jours

APRÈS

Les 30
premiers jours

- Le seuil de fuite est toujours de 24 L/min et n'est pas impacté par la limite de fuite définie dans les préférences patient.
- L'absence de donnée déclenche l'inclusion dans le groupe **Aucune donnée reçue**, mais n'ajoute pas le patient à d'autres groupes.
- L'exclusion d'un ou de plusieurs critères est paramétrable au niveau des préférences des fiches patient.

* Probl à l'utilisation et suivi de l'utilisation en cours : 4 heures ou 3 heures en fonction des règles du pays.

Fonctionnalités disponibles dans chaque groupe

Liste des groupes de patients

La liste de patients s'affiche quand vous cliquez sur un groupe. Cet écran **Probl de traitement** énumère tous les patients auxquels une fuite du masque, un IAH ou un IAC plus élevé(e) qu'attendu a été associé(e).

Julien Physician

Déconnecter

?

Aide

Patients

Entreprise

Mon profil

Administration

Marquer comme revu

Afficher patients revus

Probl de traitement

[Revenir aux Groupes d'actions](#)

Indicateurs de traitement

Tous

Appliquer

<input type="checkbox"/> Nom	Jour	Période actuelle		05/04	06/04	07/04	08/04	09/04	10/04	11/04	12/04	13/04	14/04
		Restant	Utilisation moyenne										
<input type="checkbox"/> Avery, Auguste	9	20	6h 0m										M
<input type="checkbox"/> Banks, Corey	9	20	6h 0m										M
<input type="checkbox"/> Igraine, Brian	10	19	2h 55m										M

Menu Action

Le menu Action s'affiche quand on clique sur le nom d'un patient. Ce menu permet d'obtenir des détails essentiels sur le patient et d'accéder à certaines sections du fichier du patient, telles que la page Equipement ou Remote Assist.

Les autres actions exécutables à partir de ce menu comprennent :

- Créer un rapport
- Afficher les registres récents (synthèse des autres groupes que le patient a récemment intégrés)
- Ajouter des remarques
- Marquer comme revu
- Exclure du groupe.

<input type="checkbox"/> Nom	Jour	Période actuelle		05/04	06/04	07/04	08/04	09/04	10/04	11/04	12/04	13/04	14/04
		Restant	Utilisation moyenne										
<input checked="" type="checkbox"/> Avery, Auguste	9	20	6h 0m										
<input type="checkbox"/> Graphiques			Date de naissance: 20/10/1977										
<input type="checkbox"/> Détails du patient			Date de création: 07/04/2019										
<input type="checkbox"/> Équipement			Secteur: Office C										
<input type="checkbox"/> Remote Assist			Téléphone: 6685 231 778										
<input type="checkbox"/> Remarques			Règle d'observ.: Standard										
Créer un rapport		Dans les groupes		Probl de traitement									
Afficher les registres récents				Probl à l'utilisation									
Ajouter des remarques													
Marquer comme revu													
Exclure du groupe													

Dans les groupes

Si votre patient fait partie de plusieurs Groupes d'action, ceux-ci s'afficheront ici.



Fonctionnalités disponibles dans chaque groupe

Afficher les registres récents

Dans le menu Action, cliquez sur **Afficher les registres récents** afin que la raison pour laquelle le patient a été ajouté dans le Groupe d'action s'affiche. On peut trouver tous les registres du Groupe d'action quand on clique sur **Afficher tous les registres** du Groupe d'action.

Nom
Diodore, Elise
10/10/2016 Ajouté(s) à Probl de traitement IAH > 10 pendant 5 jours consécutifs
Afficher tous les registres du Groupe d'action
<input type="button" value="Ok"/>

Afficher les patients revus

Cliquez sur **Afficher patients revus** pour afficher tous les patients qui ont été revus au cours des 48 heures écoulées.

Marqué comme revu > Afficher patients revus >

1 patient marqué comme revu

Suivi de l'utilisation en cours

[Revenir aux Groupes d'actions](#)

Nom	Jour	Période actuelle		04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10
		Restant	Utilisation moyenne						
Ruben, Lisa	63	22	2h 27m	■	■	■	■	■	■
Amir, Marie	63	22	2h 27m	■	■	■	■	■	■

Afficher 25 par page

Marqué comme revu

Une fois que vous avez traité n'importe quel problème du patient (p. ex. appelé le patient, réglé les paramètres), vous pouvez exclure le patient du Groupe d'action.

Dans le menu **Patients > Groupes d'action**, sélectionnez le patient et cliquez sur **Marquer comme revu**.

Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs patients ou sélectionner tous les patients d'un groupe.

Marqué comme revu > Afficher patients revus >

Suivi de l'utilisation en cours

[Revenir aux Groupes d'actions](#)

Nom
<input checked="" type="checkbox"/> Leon, Alice
<input type="checkbox"/> Mehdi, Francois
<input type="checkbox"/> Ruben, Lisa
<input type="checkbox"/> Amir, Marie

Restaurer les patients revus

Sélectionnez le patient et cliquez sur **Restaurer la sélection dans le groupe**, pour réintégrer un patient dans le Groupe d'action,

Restaurer la sélection dans le groupe ↺

Revu à partir de Suivi de l'utilisation en cours

[Retour aux patients](#)

Nom	Jour	Période actuelle		04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10
		Restant	Utilisation moyenne						
Leon, Alice	63	22	2h 27m	■	■	■	■	■	■
<input checked="" type="checkbox"/> Mehdi, Francois	63	22	2h 27m	■	■	■	■	■	■

Afficher 25 par page

Groupes d'action: règles de retrait automatique

Les règles de retrait automatique simplifient la gestion des groupes d'action. Les patients sont automatiquement retirés d'un groupe d'action lorsqu'ils ne répondent plus aux critères d'inclusion. Ce changement de statut est enregistré dans le journal des groupes d'action. Les patients retirés automatiquement n'apparaissent pas dans la liste **Afficher patients revus** contrairement aux patients retirés manuellement.

Règles de retrait automatique									
Les patients qui répondent à ces critères sont automatiquement retirés du groupe correspondant.									
		Probl de traitement: Fuite du masque, IAH et IAC			Probl à l'utilisation: < 3 heures*		Aucune donnée reçue		
AU COURS	Des 30 premiers jours	Probl de traitement			Probl à l'utilisation			Aucune donnée reçue	
		Critère	Seuil	Récurrence	Critère	Seuil	Récurrence		
		Fuite masque 95 %	≤ 24 L/min	3 jours d'affilée	Durée quotidienne d'utilisation	≥ 3 heures*	3 jours d'affilée		
		et/ou...							
		IAH	≤ 10 par heure	3 jours d'affilée					
		et/ou...							
IAC	≤ 5 par heure	3 jours sur 7							
								Aucune donnée reçue	
								Critère	Récurrence
APRÈS	Les 30 premiers jours	Traitement en cours			Utilisation en cours			Donnée reçue 1 jour de réception	
		Critère	Seuil	Récurrence	Critère	Seuil	Récurrence		
		Fuite masque 95 %	≤ 24 L/min	3 jours d'affilée	Durée quotidienne d'utilisation	≥ 3 heures*	3 jours d'affilée		
		et/ou...							
		IAH	≤ 10 par heure	3 jours d'affilée					
		et/ou...							
IAC	≤ 5 par heure	3 jours d'affilée							

AU COURS

Des 30 premiers jours

APRÈS

Les 30 premiers jours

- L'option de retrait manuel est uniquement disponible pour les organisations disposant des groupes d'action.
- Si un patient a été retiré d'un groupe selon un critère spécifique (fuite, utilisation, etc.), il peut être inclus à nouveau dans le groupe le lendemain.

*Probl à l'utilisation et suivi de l'utilisation en cours : 4 heures ou 3 heures en fonction des règles du pays.

Exclure un patient des groupes d'action

Exemple: Joe a été ajouté automatiquement dans le groupe d'action **Problèmes de traitement** en raison de fuites importantes. Je sais que son traitement se déroule bien malgré ses problèmes de fuites, je vais donc retirer ce critère du groupe en suivant les étapes 1 à 4.

1

Cliquez sur le nom du patient, et cliquez sur **Exclure du groupe**.

Probl de traitement

[Revenir aux Groupes d'actions](#) ☒ Filtrer les indicateurs de traitement

Indicateurs de traitement

Fuite ▼ Appliquer

<input type="checkbox"/> Nom	Jour	Période actuelle	Restant	Utilisation moyenne	05/04
<input checked="" type="checkbox"/> Avery, Auguste	9	20	6h 0m		
<input type="checkbox"/> Graphiques					
<input type="checkbox"/> Détails du patient					
<input type="checkbox"/> Équipement					
<input type="checkbox"/> Remote Assist					
<input type="checkbox"/> Remarques					
<input type="checkbox"/> Créer un rapport					
<input type="checkbox"/> Afficher les registres récents					
<input type="checkbox"/> Ajouter des remarques					
<input type="checkbox"/> Marquer comme revu					
<input type="checkbox"/> Exclure du groupe					
<input type="checkbox"/> Luce, Benoit	31	26	2h 14m		

2

Sélectionnez **Fuite** et cliquez sur **Enregistrer**.

Exclure du groupe

N'ajouter ce patient à **aucun** groupe d'action si des problèmes sont détectés avec :

☐ Utilisation
☐ IAH
☒ Fuite
☐ IAC
☐ Aucune donnée disponible

Marquer également comme revu dans :

☒ Probl de traitement

ajouté(s) 12/04/2019, 2:02PM

Enregistrer Annuler

3

Pour afficher les journaux récents du patient, cliquez sur le nom du patient, puis sur **Afficher les registres récents**.

4

Une fenêtre apparaîtra avec les journaux récents.

13/04/2019 Ajouté(s) à Probl de traitement

Fuite > 24 L/min pendant 5 jours consécutifs

[Afficher tous les registres du Groupe d'action](#)

Ok