
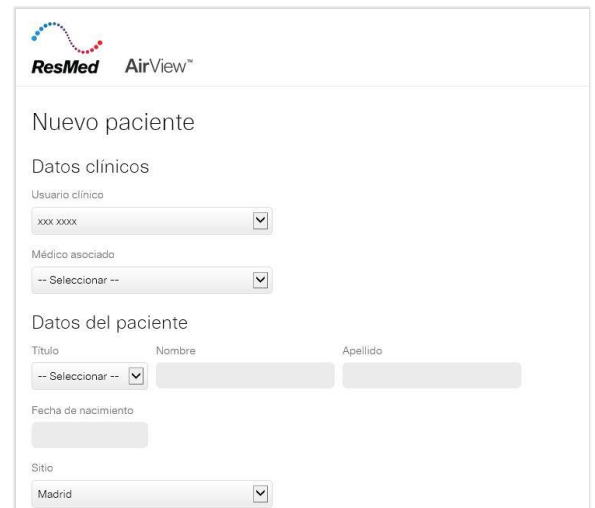


Manual de ApneaLink Air™ con AirView™

Pasos a realizar antes de la inclusión del paciente

Creación de una ficha básica de paciente

1. Conéctese a AirView, vaya a la pestaña "Pacientes" y seleccione "Diagnóstico".
2. Haga clic en 
3. Complete al menos los siguientes datos del paciente:
 - "Médico asociado": Médico intérprete, si es externo a la organización usuaria de AirView
 - "Nombre": XX
 - "Apellido": XX
 - "Fecha de nacimiento": 01/01/1900
4. Haga clic en "Guardar" y se mostrará la pantalla "Asociar dispositivo".




Formateo de ApneaLink Air y asociación a la ficha de paciente

1. Se muestra la pantalla "Asociar dispositivo".
Si no se muestra esta pantalla: desde la ficha de paciente sobre el que esté trabajando, haga clic en el botón "Asociar dispositivo".
2. Conecte ApneaLink Air al ordenador mediante un cable USB
3. Haga clic en "Continuar" y, a continuación, marque la casilla "Borrar cualquier grabación que se encuentre en el dispositivo". Finalmente, haga clic en "Sí, iniciar asociación".

Nota 1: La asociación de un dispositivo eliminará todos los datos existentes. Antes de proceder, compruebe que la grabación anterior se ha transferido.

Nota 2: este paso utiliza el módulo Java. Por tanto, para preparar el equipo correctamente, es necesario que actualice su versión de Java de forma regular.

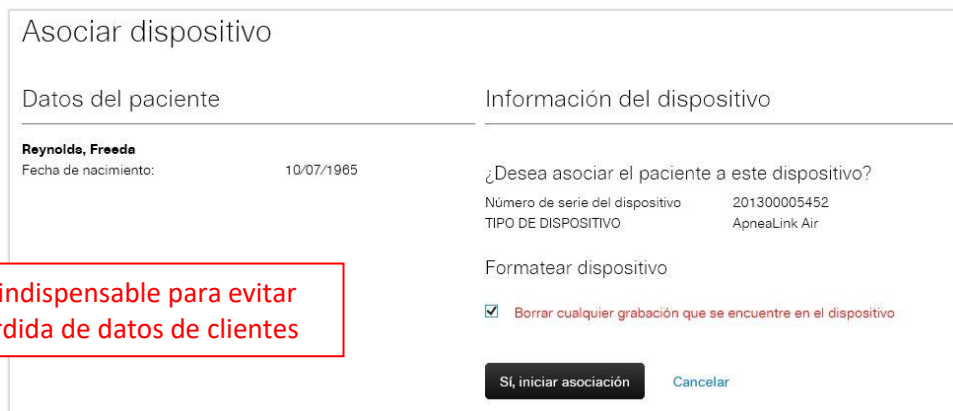


4. El equipo ahora está listo para realizar la grabación de un nuevo paciente.




Pasos a realizar después de la grabación del sueño del paciente

Inicie sesión en AirView, vaya a la pestaña “Pacientes” y seleccione la opción “Diagnóstico”.

Transferencia de datos del paciente

1. En la barra de herramientas, haga clic en  Descarga de dispositivo
2. Conecte el dispositivo de diagnóstico a su ordenador por medio de un cable USB y haga clic en “Continuar”
Nota: AirView detecta el dispositivo y busca de forma automática el paciente activo asociado. Si no lo encuentra, tiene la opción de buscarlo manualmente.
3. Haga clic en “Sí, iniciar asociación”.
Nota: Asegúrese de seleccionar el paciente correcto, ya que esta acción no se puede anular. La transferencia de los datos del dispositivo comenzará automáticamente y, una vez finalizada, aparecerá un mensaje de confirmación.
4. Si la ficha de paciente mostrada no es la correcta, haga clic en “Buscar pacientes”.
5. El informe automático se mostrará inmediatamente. Si el médico asociado ha sido debidamente registrado, podrá acceder a los datos de su paciente.

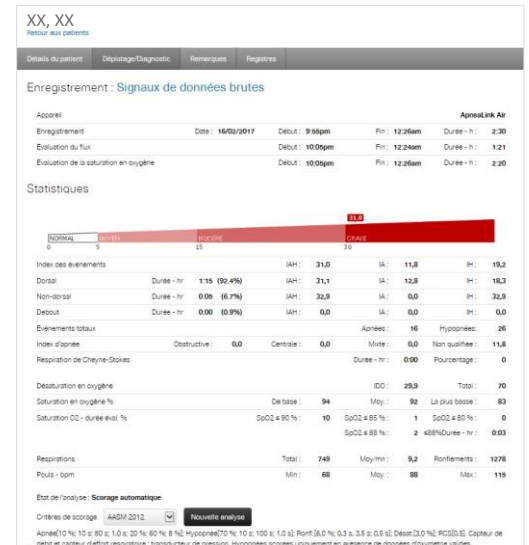

Personalización de la ficha de paciente

1. Una vez que el informe está en pantalla, haga clic en “Datos del paciente”.
2. Haga clic en el botón “Personalizar” al final del informe para poder modificar los siguientes datos del paciente:
 - “Médico asociado”: Médico intérprete si no pertenece a la organización que utiliza AirView
 - “Nombre” y “Apellido”: Nombre y apellido del paciente
 - “Fecha de nacimiento”: en formato dd/mm/aaaa
3. Si colabora con un médico intérprete, podrá asociarlo aquí si no lo hizo durante la creación del paciente
4. A continuación, haga clic en “Guardar”.

Preparación para la próxima grabación

Para asegurarse de que ApneaLink Air esté siempre preparado y para evitar problemas informáticos de última hora, repita directamente estos dos pasos (ver en el anverso):

- “Creación de una ficha básica de paciente”
- “Formateo de ApneaLink Air”