



ApneaLink Air -seulontalaitteen pukemisohje

Aseta laite rintakehän keskelle ja kiinnitä vyöllä kainaloiden alta sopivalle kireydelle.

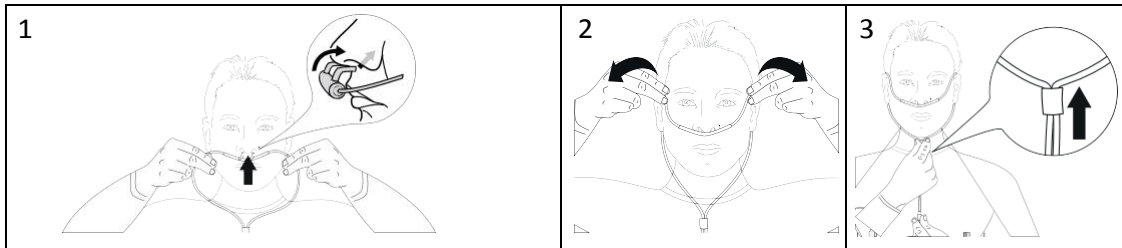

Aseta viikset nenään väkäsät alaspäin. Kiepauta lenkit korvien takaa, kiristä kevyesti leuan alta ja teippaa poskiin. Laita tuttianturi siihen sormeen, jossa se ei purista eikä ole liian höllä, teippaa johtoa kämmenselkään tai sormeen.

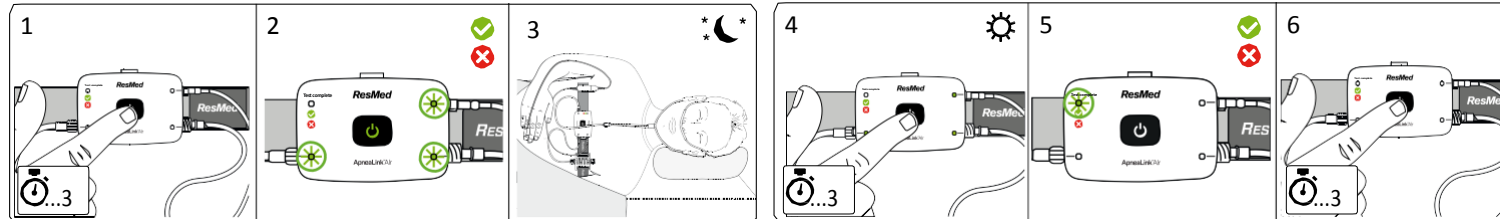

Illalla (1-3): paina 3 sekuntia niin, että näet napin **keskellä** olevan merkin muuttuvan vihreäksi  (älä paina sormenpäällä koko merkkiä piiloon) ja ota sormi pois. Laite käynnistyy ja vihreät merkkivalot syttyvät. Jos jokin valo on punainen, tarkista nenäviiksien, sormioksimetrin tai vyön kiinnitys. Hyvää yötä!

Aamulla (4-6): paina 3 sekuntia, rekisteröinti päättyy. Jos painat vielä uudelleen 3 sekuntia, laite sammuu kokonaan (laitteen vasemmassa yläreunassa oleva testivalo sammuu itsestäänkin muutaman minuutin kuluttua. Se on vihreä, jos yö >4h).

HUOM! Älä irrota laitteen osia toisistaan, pakkaa vain annettuun pussiin ja palauta takaisin. Hyvää päivänalkua!



ResMed

ApneaLink™ Air



EDUSTAJA:

ResMed Hevosenkenkä 3 02600 Espoo P098676820 Sinfo@resmed.fi



ResMed

ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr. 16
82152 Martinsried Saksa

ResMed.com

JAKELU:

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA

Katso osoitteesta www.resmed.com tiedot muista ResMed-toimipaikoista ympäri maailmaa. © 2014 ResMed Ltd. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
1017403-2

CE
0123