

Aktions-Gruppen Anleitung


Die Funktion **Aktions-Gruppen** von AirView filtert und gruppiert Ihre Patienten nach bestimmten Kriterien in **Aktions-Gruppen**. Sie können sich auf diejenigen Patienten konzentrieren, die Ihre Betreuung benötigen.

Durch **Aktions-Gruppen** verwalten Sie Ihre Patienten effizienter. Die Funktion **Aktions-Gruppen** wird für HCP Organisationen spezifisch aktiviert. Patienten werden basierend darauf, ob sie ein bestimmtes Kriterium erfüllt haben, einer Gruppe hinzugefügt/aus einer Gruppe entfernt. Außerdem kann der Patient von einem bestimmten Parameter ausgenommen werden.

Wählen Sie aus dem Menü **Patienten Aktions-Gruppen**.

Aktions-Gruppen

Patienten werden nach bestimmten Kriterien gefiltert und gruppiert. Klicken Sie auf eine dieser Gruppen, um spezifische Therapiedaten der Patienten aus den letzten 10 Tagen zu sehen.

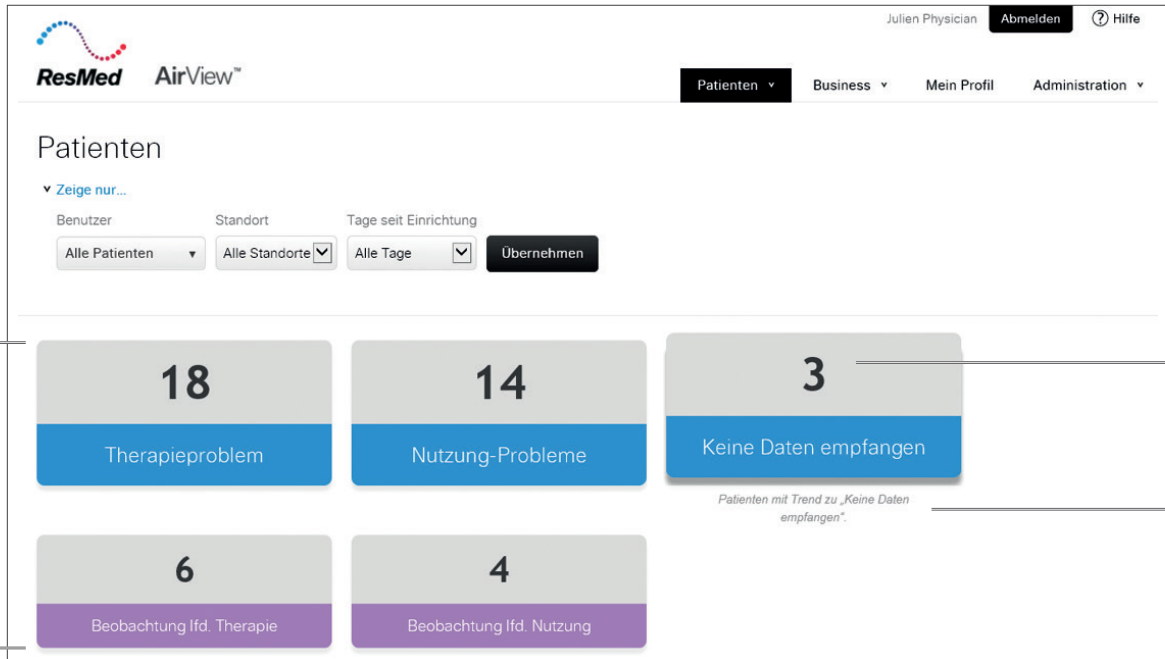

Anzahl der Patienten

Gibt die Anzahl der Patienten in der Gruppe an.

Beschreibung der Regel

Bewegen Sie die Maus über eine der Gruppen, um die Regel zu sehen, die für die Gruppe gilt.

Therapieproblem	Nutzung-Probleme	Keine Daten empfangen	Beobachtung lfd. Therapie	Beobachtung lfd. Nutzung
Enthält Patienten, bei denen die Maskenleckage, AHI oder zAI in den ersten 30 Tagen ihrer Therapie höher als erwartet ist.	Enthält Patienten, die eine geringe Nutzung ihres Geräts während der ersten 30 Tage der Therapie aufweisen.	Enthält Patienten, deren Daten während der ersten 30 Tage der Therapie 3 Tage lang oder nach den ersten 30 Tagen, 10 Tage lang nicht übertragen wurden.	Enthält Patienten, bei denen die Maskenleckage, AHI oder zAI nach den ersten 30 Tagen ihrer Therapie höher als erwartet ist.	Enthält Patienten, die eine geringe Nutzung ihres Geräts nach den ersten 30 Tagen der Therapie aufweisen.

Aktions-Gruppen: Regeln für automatisches Hinzufügen

AirView fügt Patienten automatisch den Aktions-Gruppen hinzu, wenn sie die entsprechenden Kriterien erfüllen, und entfernt sie, wenn sie diese Kriterien nicht mehr erfüllen. Patienten können auch manuell aus Aktions-Gruppen entfernt werden. Einzelheiten zum automatischen und manuellen Entfernen sind auf Seite 5 und 6 zu finden.

Regeln für automatisches Hinzufügen						
Patienten, die diese Kriterien erfüllen, werden der entsprechenden Gruppe automatisch hinzugefügt						
Therapieprobleme: Maskenleckage, AHI & zAI			Nutzung-Problem: < 4 Stunden*		Keine Daten empfangen	
Therapieprobleme			Nutzung-Probleme		Keine Daten empfangen	
Problem	Grenze	Zeitraum	Problem	Grenze		
95% Maskenleckage	> 24 L/min	5 Tage <u>in Folge</u>				
und/oder...						
AHI	> 10 pro Stunde	5 Tage <u>in Folge</u>	Tägl. Nutzung in Stunden	< 4 Stunden *		
und/oder...						
zAI	> 5 pro Stunde	5 von 7 Tagen				
Beobachtung lfd. Therapie			Beobachtung lfd. Nutzung		Keine Daten empfangen	
Problem	Grenze	Zeitraum	Problem	Grenze		
95% Maskenleckage	> 24 L/min	5 Tage <u>in Folge</u>				
und/oder...						
AHI	> 10 pro Stunde	7 Tage <u>in Folge</u>	Tägl. Nutzung in Stunden	< 4 Stunden *		
und/oder...						
zAI	> 5 pro Stunde	7 Tage <u>in Folge</u>				
					Keine Daten empfangen	
					Problem	Zeitraum
						3 Tage <u>in Folge</u> WÄHREND der ersten 30 Tage
						15 Tage <u>in Folge</u> NACH den ersten 30 Tagen

- Die Leckage beträgt immer 24 l/min und wird durch Einstellungen: Leckagegrenze (je Patient) nicht verändert
- Fehlende Daten lösen die Aufnahme in die Gruppe **Keine Daten empfangen** aus. Der Patient wird dann keiner anderen Gruppen hinzugefügt
- Um die Funktion des automatischen Hinzufügens für einzelne Patienten zu deaktivieren, auf **Patientenprofil > Einstellungen > Bearbeiten** klicken

*Nutzung-Problem & Beobachtung lfd. Nutzung: 4 Stunden oder 3 Stunden je nach länderspezifischen Vorgaben.

Innerhalb der jeweiligen Gruppe verfügbare Funktionen

Patientengruppenliste

Die Patientengruppenliste wird angezeigt, wenn Sie auf eine Gruppe klicken. Auf diesem Bildschirm erscheinen alle Patienten, bei denen die Leckage, AHI oder zAI höher als erwartet ist.

Julien Physician

Abmelden

?

Patienten

Business

Mein Profil

Administration

Als geprüft markieren

Geprüfte Patienten anzeigen

Therapieproblem

[Zurück zu Aktionsgruppen](#)

Therapie-Messgrößen

Alle

Übernehmen

Name	Tag	Aktueller Zeitraum		16/04	17/04	18/04	19/04	20/04	21/04	22/04	23/04	24/04	25/04
		Verbleibend	Durchschnittliche Nutzung										
☐ Aubin, Arnaud	9	20	6 std 0 min										
☐ Avery, Auguste	9	20	6 std 0 min										
☐ Igraine, Brian	10	19	2 std 55 min										

Aktionsmenü

Das Aktionsmenü wird angezeigt, wenn Sie auf den Namen eines Patienten klicken. In diesem Menü können Sie Details des Patienten sehen, sowie auf bestimmte Bereiche der Patientendaten, wie etwa Verordnung oder TeleService zugreifen.

- Bericht erstellen oder
- Aktuelle Protokolle ansehen.
- Als geprüft markieren
- Aus der Gruppe ausschließen

				Aktueller Zeitraum								
☐ Name	Tag	Verbleibend	Durchschnittliche Nutzung	16/04	17/04	18/04	19/04	20/04	21/04	22/04	23/04	
☒ Aubin, Arnaud	9	20	6 std 0 min									
☐ Grafiken		Geburtsdatum	20/10/1977									
☐ Patientenangaben		Einrichtungsdatum	18/04/2019									
☐ Verordnung		Standort	Office C									
☐ TeleService		Telefon	6685 231 778									
☐ Notizen		Compliance-Option	Standard									
☐ Bericht erstellen		In Gruppen	Therapieproblem									
☐ Aktuelle Protokolle ansehen												
☐ Notizen hinzufügen		19	2 std 55 min									
☐ Als geprüft markieren		19	2 std 55 min									
☐ Aus der Gruppe ausschließen		19	2 std 55 min									

In Gruppen

Wenn sich Ihr Patient in mehreren Aktions-Gruppen befindet, wird dies hier angezeigt.

Innerhalb der jeweiligen Gruppe verfügbare Funktionen

Aktuelle Protokolle ansehen

Klicken Sie vom Aktionsmenü aus auf Aktuelle Protokolle ansehen, um zu erfahren, aus welchem Grund der Patient dieser Aktionsgruppe zugeordnet wurde. Sie können alle Aktions-Gruppen sehen, wenn Sie auf Alle Aktions-Gruppen-Protokolle ansehen klicken.

Name	Tag	Aktueller Zeitraum		04/10
		Verbleibend	Durchschnittliche Nutzung	
☐ Leon, Alice	63	22	2 std 27 min	☒
☐ Mehdi, Francois	63	22	2 std 27 min	☒
☐ Amir, Marie	63	22	2 std 27 min	☒

Anz 11/10/2016

Zu Beobachtung lfd. Nutzung hinzugefügt
Nutzung < 3 an 5 aufeinanderfolgenden Tagen

[Alle Aktionsgruppen-Protokolle ansehen](#)

OK

Geprüfte Patienten anzeigen

Klicken Sie auf geprüfte Patienten anzeigen, um alle Patienten, die in den letzten 48 Stunden geprüft worden sind, zu sehen.

Als geprüft markieren >

Geprüfte Patienten anzeigen >

1 Patient als überprüft markiert

Beobachtung lfd. Nutzung

Zurück zu Aktionsgruppen

☐ Name	Tag	Aktueller Zeitraum		05/10	06/10	07/10	08/10
		Verbleibend	Durchschnittliche Nutzung				
☐ Leon, Alice	62	23	2 std 27 min				
☐ Ruben, Lisa	62	23	2 std 27 min				
☐ Amir, Marie	62	23	2 std 27 min				

Als geprüft markieren

Wenn Sie auf die Probleme des Patienten reagiert haben (z.B. den Patienten angerufen, die Einstellung angepasst haben) können Sie den Patienten aus der Aktionsgruppe entfernen. Klicken Sie im Menü Patienten > Aktionsgruppe auf den Patienten und auf als geprüft markieren. Sie können auch mehrere Patienten oder alle Patienten einer Gruppe wählen.

Als geprüft markieren

Geprüfte Patienten anzeigen

Beobachtung lfd. Nutzung

Zurück zu Aktionsgruppen

☐ Name	Tag	Aktueller Zeitraum		05/10
		Verbleibend	Durchschnittliche Nutzung	
☐ Leon, Alice	62	23	2 std 27 min	
☒ Mehdi, Francois	62	23	2 std 27 min	
☐ Ruben, Lisa	62	23	2 std 27 min	

Geprüfte Patienten wiederherstellen

Wählen Sie den Patienten aus und klicken Sie auf Auswahl wieder der Gruppe hinzufügen, um einen Patienten in einer Aktionsgruppe wiederherzustellen.

Auswahl wieder der Gruppe hinzufügen ↺

Geprüft von Beobachtung lfd. Nutzung

Zurück zu Patienten

☒ 1 ausgewählt: Alle 1 in einer Gruppe auswählen	Tag	Verbleibend	Aktueller Zeitraum Durchschnittliche Nutzung	05/10	06/10	07/10
☒ Mehdi, Francois	62	23	2 std 27 min			

Anzeige 25 pro Seite

Aktions-Gruppen: Regeln für automatisches Entfernen

Die Regeln für automatisches Entfernen vereinfachen die Verwaltung von Aktions-Gruppen. Patienten werden automatisch aus einer Aktions-Gruppe entfernt, wenn sie keines der Einschlusskriterien mehr erfüllen. Diese Statusänderung wird im Patientengruppenprotokoll erfasst. Patienten, die automatisch entfernt werden, sind in der Liste **Als geprüft markieren** nicht aufgeführt. Patienten, die manuell aus einer Gruppe entfernt werden, erscheinen in der Liste **Geprüfte Patienten anzeigen**.

Regeln für automatisches Entfernen							
Patienten, die diese Kriterien erfüllen, werden automatisch aus der entsprechenden Gruppe entfernt							
Therapieprobleme: Maskenleckage, AHI & zAI			Nutzung-Problem: < 4 Stunden*		Keine Daten empfangen		
WÄHREND der ersten 30 Tage	Therapieprobleme			Nutzung-Probleme		Keine Daten empfangen	
	Problem	Grenze	Zeitraum	Problem	Grenze		Zeitraum
	95% Maskenleckage	≤ 24 L/min	3 Tage <u>in Folge</u>	Tägl. Nutzung in Stunden	≥ 4 Stunden *		3 Tage <u>in Folge</u>
	und/oder...						
	AHI	≤ 10 pro Stunde	3 Tage <u>in Folge</u>				
	und/oder...						
zAI	≤ 5 pro Stunde	3 Tage <u>in Folge</u>					
NACH den ersten 30 Tage	Beobachtung lfd. Therapie			Beobachtung lfd. Nutzung		Daten empfangen Für 1 Tag	
	Problem	Grenze	Zeitraum	Problem	Grenze		Zeitraum
	95% Maskenleckage	≤ 24 L/min	3 Tage <u>in Folge</u>	Tägl. Nutzung in Stunden	≥ 4 Stunden*		3 Tage <u>in Folge</u>
	und/oder...						
	AHI	≤ 10 pro Stunde	3 Tage <u>in Folge</u>				
	und/oder...						
zAI	≤ 5 pro Stunde	3 Tage <u>in Folge</u>					

WÄHREND

der ersten 30 Tage

NACH

den ersten 30 Tage

Einen Patienten aus Aktions-Gruppen ausschließen

Beispiel: Joe wurde aufgrund einer hohen Leckage automatisch in der Gruppe **Therapieproblem** aufgenommen. Mir ist bekannt, dass er mit seiner Therapie trotz seiner Leckage-Probleme gut zurechtkommt, deshalb möchte ich ihn aus der Gruppe entfernen, indem ich die Schritte 1 bis 4 durchführe.

1 Den Namen des Patienten anklicken, dann auf **Aus der Gruppe ausschließen** klicken.

2 Leckage wählen und auf **Speichern** klicken.

3 Um die letzten Protokolle des Patienten aufzurufen, auf den Namen des Patienten klicken, dann auf **Aktuelle Protokolle ansehen** klicken.

4 Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit den letzten Protokollen.

Therapieproblem

[Zurück zu Aktionsgruppen](#)

Therapie-Messgrößen

Alle

Übernehmen

Name	Tag	Aktueller Zeitraum	
		Verbleibend	Durchschnittliche Nutzung
☐ Aubin, Arnaud	9	20	6 std 0 min
☒ Avery, Auguste	9	20	6 std 0 min
Grafiken Patientenangaben Verordnung TeleService Notizen Bericht erstellen Aktuelle Protokolle ansehen Notizen hinzufügen Als geprüft markieren Aus der Gruppe ausschließen Geburtsdatum 20/10/1977 Einrichtungsdatum 18/04/2019 Standort Office C Telefon 6685 231 778 Compliance-Option Standard In Gruppen Therapieproblem Nutzung-Probleme			
		19	2 std 55 min
	12		6 std 3 min
☐ Cosete, Deni	17	12	6 std 3 min

Aus der Gruppe ausschließen

Fügen Sie diesen Patienten **keiner** Aktionsgruppe hinzu, wenn Probleme erkannt werden mit:

☐ Nutzung

☐ AHI

☒ Leckage

☐ ZAI

☐ Keine Daten verfügbar

Außerdem als überprüft kennzeichnen in:

☒ Therapieproblem 26/04/2019, 6:00AM hinzugefügt

Speichern

Abbrechen

26/04/2019 Durch Julien Physician wieder zu Therapieproblem hinzugefügt

26/04/2019 Als geprüft in Therapieproblem durch Julien Physician markiert

24/04/2019 Zu Therapieproblem hinzugefügt

Leckage > 24 l/Min an 5 aufeinanderfolgenden Tagen

Alle Aktionsgruppen-Protokolle ansehen

OK

- Die Option des manuellen Entfernens steht nur für Organisationen mit Aktions-Gruppen zur Verfügung.
- Wenn ein Patient wegen einem bestimmten Wert (z. B. Leckage, AHI usw.) aus einer Gruppe ausgeschlossen wurde, kann er wegen gleicher Kriterien am nächsten Tag wieder in der Gruppe zu finden sein.