



ResMed

Lumis™ series


VPAP ST-A



Kurzanleitung
Deutsch


Lesen Sie vor dem Gebrauch die gesamte Lumis™ Gebrauchsanweisung durch.

Therapie vorbereiten

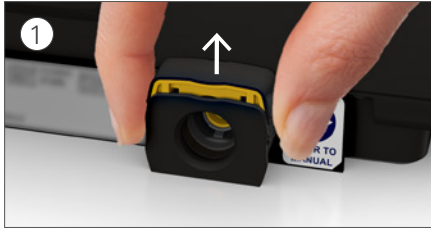

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte Oberfläche, fassen Sie den Halteclip an der Rückseite des Gerätes und ziehen Sie ihn zum Öffnen nach oben.

Hinweis: Die Abbildung zeigt den Halteclip in der geöffneten Stellung.

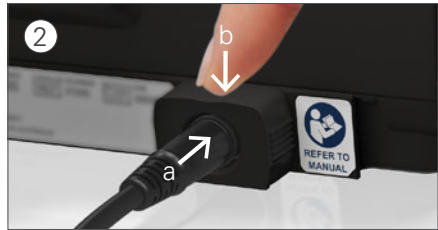


(a) Schieben Sie den Stecker des Stromkabels in die Stromeingangsbuchse des Gerätes und (b) drücken Sie zur Sicherung den Halteclip nach unten.

Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Netzteil und das andere Ende mit der Steckdose.



Verbinden Sie den Atemschlauch fest mit dem Luftauslass an der Rückseite des Gerätes.

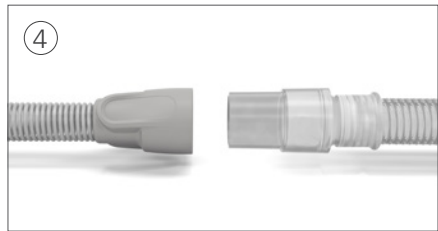

Verbinden Sie nun das Maskensystem fest mit dem freien Ende des Atemschlauches. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Therapie zu starten.

Lumis mit HumidAir

Wenn Sie ein Lumis Gerät haben, das mit einem HumidAir™ beheizbaren Befeuchter ausgestattet ist, füllen Sie den Befeuchter wie folgt:



Öffnen Sie den Befeuchter und füllen Sie Wasser bis zur Maximalmarkierung ein.



Schließen Sie den Befeuchter und schieben Sie ihn seitlich in das Gerät hinein.

Der beheizbare Befeuchter lindert trockene und verstopfte Atemwege und trägt zu einer komfortableren Therapie bei.

Therapie beginnen


Wenn Sie Ihr Gerät bisher noch nicht benutzt haben, müssen Sie sich eventuell eine Zeit lang an die Therapie gewöhnen. Das ist normal. Bei den meisten Patienten dauert es ein bis zwei Wochen, bis sie sich an den Luftdruck gewöhnt haben.

Beseitigung von Symptomen durch geänderte Komforteinstellungen

Wenn Sie Probleme haben, mit der Therapie vertraut zu werden, können Sie die Lumis-Komfortfunktionen nutzen.

- **Schwierigkeiten beim Einschlafen** – Wenn Ihnen das Einschlafen bei hohem Druck schwerfällt, schalten Sie die Rampenfunktion ein oder **verlängern** Sie die Dauer der Rampe.
- **Zu viel Luft** – Wenn Sie gefühlt zu viel Luft bekommen, schalten Sie die Rampenfunktion ein oder **verlängern** Sie die Dauer der Rampe.
- **Zu wenig Luft** – Wenn Sie gefühlt zu wenig Luft bekommen, stellen Sie die Rampe auf Aus.

So ändern Sie die Rampe:

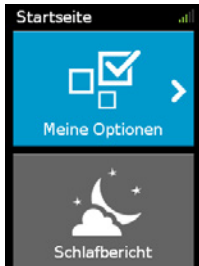

1. Drücken Sie auf den Bedienregler, um „Meine Optionen“ aufzurufen.



2. Drehen Sie am Bedienregler, bis „Rampe“ hervorgehoben wird, und drücken Sie dann den Bedienregler, um diese Option auszuwählen.



3. Drehen Sie am Bedienregler, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.



4. Drücken Sie auf den Bedienregler, um die geänderte Einstellung zu speichern.

Wenn Ihr Lumis Gerät mit einem HumidAir Befeuchter ausgestattet ist, stehen weitere Komfortfunktionen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Therapie komfortabler gestalten können.

- **Trockene oder laufende Nase** – Falls Ihre Nase trocken wird oder beginnt zu laufen, stellen Sie das Befeuchtungsniveau höher ein.
- **Wassertröpfchen (Kondensation)** – Falls sich Wassertröpfchen auf Ihrer Nase, an Ihrer Maske oder in Ihrem Atemschlauch bilden, stellen Sie das Befeuchtungsniveau niedriger ein.



ResMed

Reinigung

1. Waschen Sie den Atemschlauch in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Er darf nicht in der Wasch- oder Spülmaschine gewaschen werden.
2. Spülen Sie den Atemschlauch gut ab und lassen Sie ihn vor direktem Sonnenlicht und Hitze geschützt an der Luft trocknen.
3. Wischen Sie das Äußere des Gerätes mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn Sie ein Lumis Gerät haben, das mit einem HumidAir Befeuchter ausgestattet ist, reinigen Sie den Befeuchter wie in Schritt 1 und 2 beschrieben.

Ausführliche Anweisungen zur Reinigung der Maske finden Sie in der Gebrauchsanweisung für die Maske.

Einzelteile regelmäßig prüfen und wechseln

Aus Komfort- und Gesundheitsgründen sollten Sie die Einzelteile und Verbrauchsmaterialien für Ihr Gerät regelmäßig prüfen und gegebenenfalls wechseln. Durch regelmäßige Wechsel der Einzelteile und Verbrauchsmaterialien tragen Sie dazu bei, dass Sie eine optimale und dauerhaft komfortable Therapie erhalten.

Ausführliche Anweisungen zur Prüfung des Gerätes finden Sie in der Lumis Gebrauchsanweisung.

Seriennummer	Gerätenummer
Typ und Größe der Maske	Setup-Datum
Notizen	



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

VERTRIEB:

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

Informationen zu weiteren Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Webseite unter www.resmed.com.

Informationen über Patente und anderes geistiges Eigentum sind www.resmed.com/ip zu entnehmen. Lumis, ClimateLine und HumidAirs sind Marken von ResMed Ltd. ClimateLine ist im amerikanischen Patent- und Markenamt eingetragen.

© 2015 ResMed Ltd. 288336/1 2015-08

ResMed.com

CE 0123
0682



288336