


S8™ Auto 25


Guide d'installation rapide à l'intention des cliniciens

Français

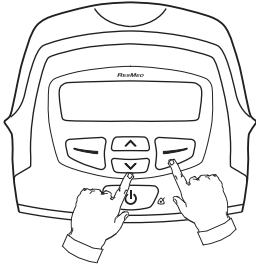

Pour accéder au menu Clinique :


Maintenez les touches et enfoncées simultanément pendant au moins trois secondes.

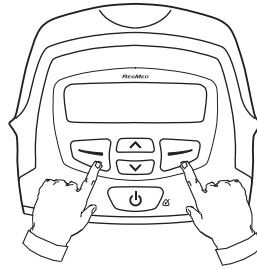

Pour accéder au menu Revue :

Maintenez les touches et enfoncées simultanément pendant au moins trois secondes.

Sélectionnez Quit pour retourner au menu Patient.

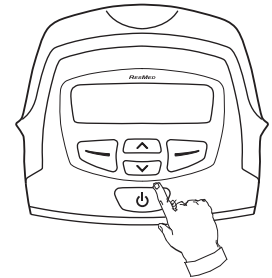


Pour accéder à la fonction d'ajustement du masque :

Maintenez la touche enfoncée pendant au moins trois secondes.

Appuyez sur la touche pour retourner au menu Patient.


Ecrans de traitement

Après le démarrage du traitement, un écran de traitement initial s'affiche. Appuyez sur la touche ou pour passer d'un écran à l'autre.

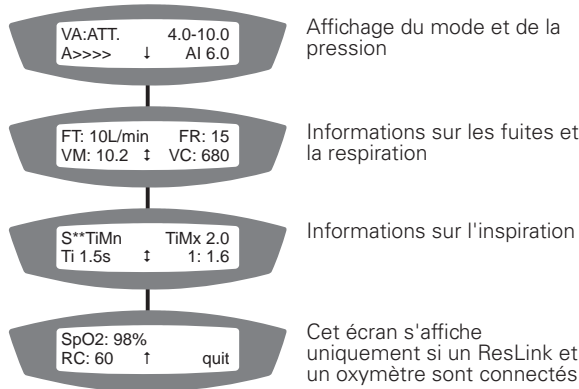


Expiration (mode VAuto)


Vous pouvez ajuster la vitesse du paramètre Expir. pour assurer que la baisse de pression est au niveau le plus confortable pour le patient.

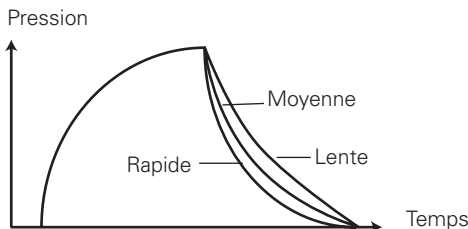

Menu Patient

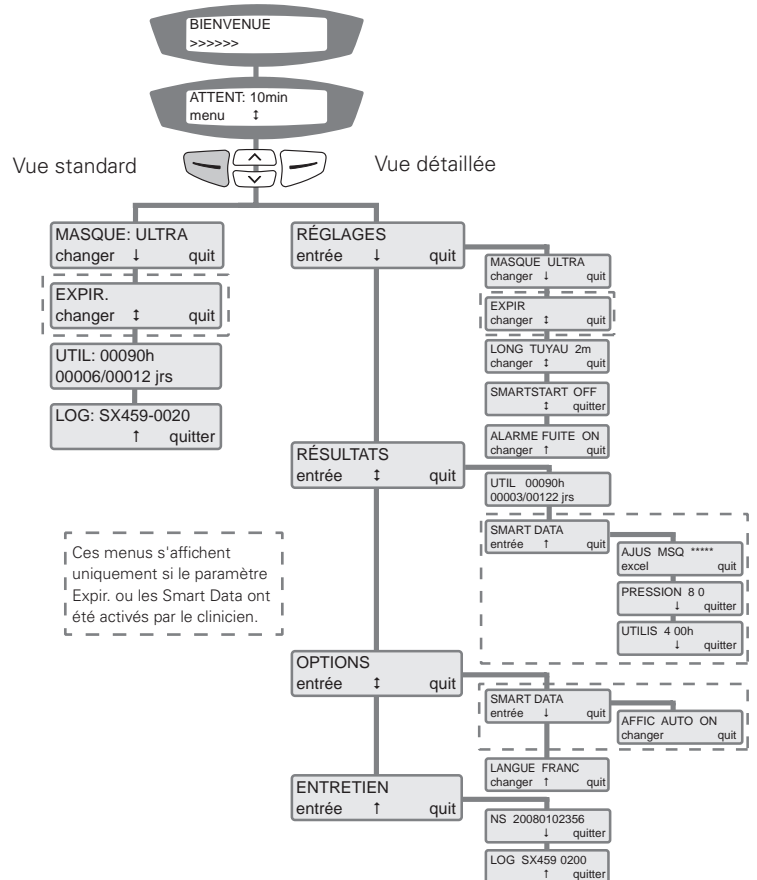


Menu Clinique

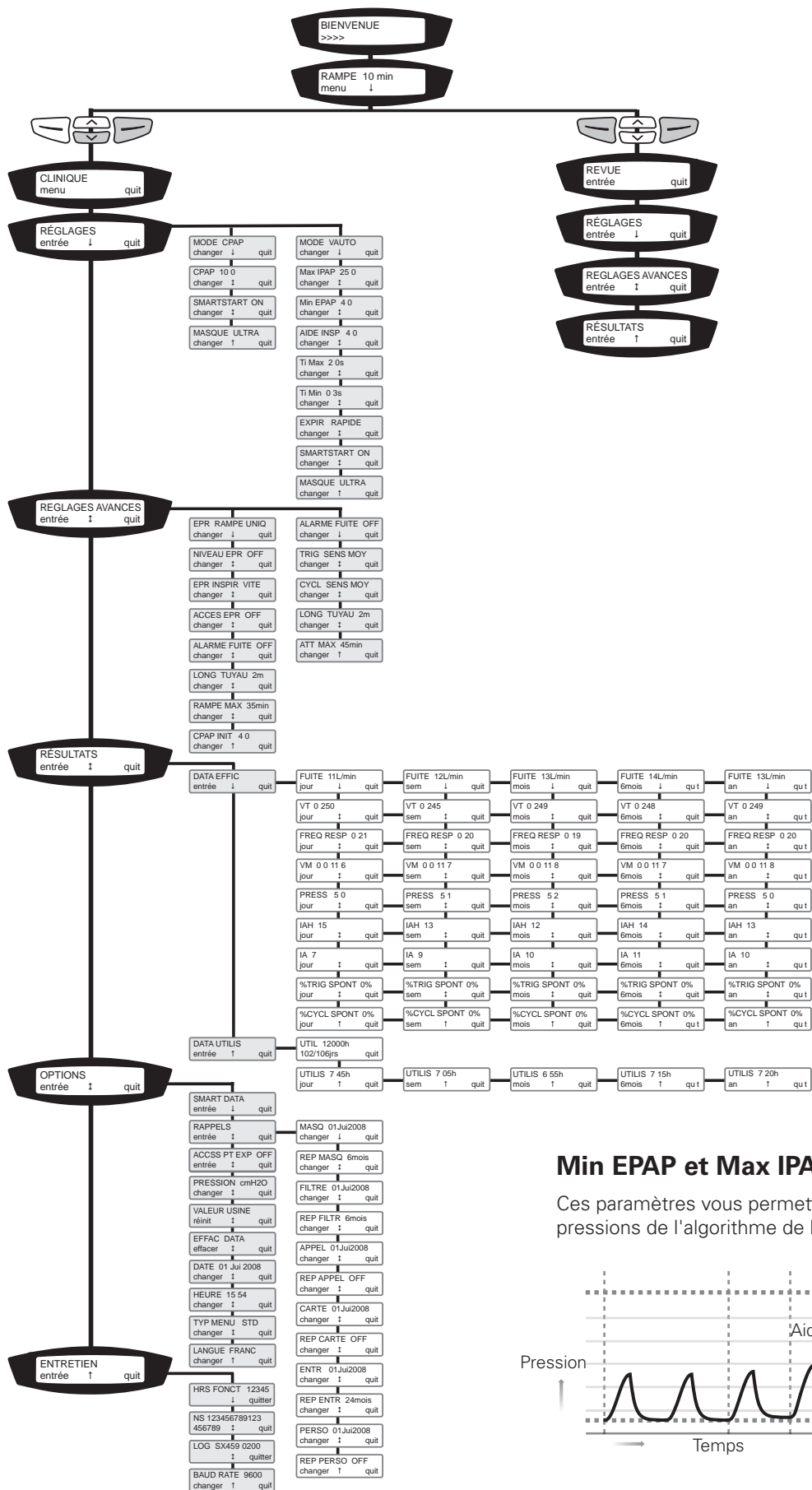

Min EPAP et Max IPAP (mode VAuto)

Ces paramètres vous permettent de définir la plage de pressions de l'algorithme de l'AutoSet.

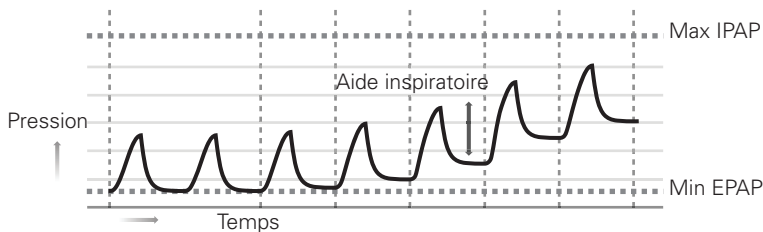

Voir le manuel utilisateur et le manuel clinique de la S8 Auto 25 pour de plus amples informations.

©2009 ResMed Ltd.

268266/2 09 09

CE
0120