

RESMED

S9™ Auto 25

POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

Information Guide

Dansk

S9 | Series
More Comfort.

Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Brugsindikationer

S9 Auto 25 er beregnet til behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA) hos patienter, der vejer mere end 30 kg. S9 Auto 25 er beregnet til brug i hjemmet og på hospitalet.

Kontraindikationer

Behandling med positivt luftvejstryk kan være kontraindiceret hos patienter, som lider af følgende:

- alvorlig bulløs lungesygdom
- pneumothorax eller pneumomediastinum
- patologisk lavt blodtryk, især i forbindelse med intravaskulær volumenreduktion
- dehydrering
- cerebrospinalvæskelækage, nylig kranieoperation eller traume.

Bivirkninger

Patienter bør rapportere usædvanlige smerter i brystet, svær hovedpine eller øget stakåndethed til den ordinerende læge. Akut infektion i de øvre luftveje kan kræve, at behandlingen midlertidigt indstilles.

Følgende bivirkninger kan opstå i forbindelse med behandlingen med apparatet:

- tørhed i næse, mund eller svælg
- Næseblod
- Oppustethed
- ubehag i mellemøre eller bihuler
- Øjenirritation
- hududslæt.

Fejlfinding

Hvis der er problemer, bør nedenstående forslag prøves. Hvis dette ikke løser problemet, skal leverandøren eller ResMed kontaktes. Forsøg ikke at åbne apparatets hus.

Problem/mulig årsag

Løsning

Intet skærbillede.

Strømmen er ikke tilsluttet.

Kontrollér, at el-kablet er tilsluttet, og at der er tændt på stikkontakten (hvis det er relevant).

Jævnstrømsstikket er kun delvist indsat bag på pppqrqtet, eller det er indsat for langsomt.

Sæt jævnstrømsstikket helt ind.

Utilstrækkeligt luft givet fra Auto 25-apparatet.

Rampetiden er i gang.

Vent til lufttrykket er steget, eller vælg en anden rampetid.

Luftfilteret er snavset.

Udskift luftfilteret.

Luftslangen er ikke sat ordentligt i.

Kontrollér luftslangen.

Luftslangen er blokeret, trykket eller punkteret.

Fjern blokeringen eller frigør luftslangen. Kontrollér slangen for punkteringer.

Maske og hovedbånd sidder forkert.

Justér maskens og hovedbåndets position.

Der er valgt en forkert luftslange.

Hvis du bruger en SlimLine, Standard eller 3 m luftslange, skal du sørge for, at du har valgt den rigtige luftslange via menuen.

Apparatet starter ikke, når du trækker vejret gennem masken.

Åndedraget er ikke dybt nok til at udløse SmartStart/Stop.

Træk vejret dybt ind og ud gennem masken.

Der er for stor lækage.

Justér maskens og hovedbåndets position.

Bemærk: Hvis Lækalarm er slået til, aktiveres en hørbar alarm, og der vises en meddelelse om stor lækage.

Luftslangen er ikke tilsluttet ordentligt. Tilslut den ordentligt i begge ender.

Problem/mulig årsag	Løsning
----------------------------	----------------

SmartStart/Stop er slået fra.	Slå SmartStart/Stop til.
-------------------------------	--------------------------

Bemærk: SmartStart/Stop er ikke tilgængelig, hvis Lækalarm er slået til.

Apparatet stopper ikke, når du tager masken af

SmartStart/Stop er slået fra.	Slå SmartStart/Stop til.
-------------------------------	--------------------------

Bemærk: SmartStart/Stop er ikke tilgængelig, hvis Lækalarm er slået til.

SmartStart/Stop er slået til, men apparatet stopper ikke automatisk, når du tager masken af.

Det anvendte maskesystem er ikke kompatibelt.	Brug kun udstyr, der anbefales af ResMed.
---	---

Patienten bruger en næsepudemasker med indstillet tryk på under 7 cm H ₂ O.	Slå SmartStart/Stop fra
--	-------------------------

Trykket stiger u hensigtsmæssigt

Taler, hoster eller trækker vejret på en unormal måde.	Bed patienten om at undgå at tale med en næsemasker på og trække vejret så normalt som muligt.
--	--

Maskepuden vibrerer mod huden.	Justér hovedbåndet.
--------------------------------	---------------------

Puden sidder forkert og skaber stor lækage.	Justér hovedbåndet eller tilpas puden igen.
---	---

Viser meddelelsen: For høj temperatur; se brugervejledningen

Apparatet har været opbevaret i varme omgivelser.	Lad det køle lidt af, før det bruges igen. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet.
---	---

Luftfilteret er blokeret.	Udskift luftfilteret. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet.
---------------------------	--

Luftslangen er blokeret.	Kontrollér luftslangen og fjern eventuel blokering. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet.
--------------------------	--

Problem/mulig årsag	Løsning
Fugterens indstilling er sat for højt, og det resulterer i vandansamlinger i luftslangen.	Reducér fugterindstillingen og tøm vandet af luftslangen.
Viser meddelelsen: Efterse ResMed 30/90 W strømforsyningsenheden og sæt tilslutningen helt i	
Jævnstrømsstikket er kun delvist indsat bag på pppqrqtet, eller det er indsat for langsomt.	Sæt jævnstrømsstikket helt ind.
En strømforsyningsenhed, der ikke kommer fra ResMed, er koblet til apparatet.	Fjern strømforsyningsenheden, og udskift den med en strømforsyningsenhed fra ResMed.
Strømforsyningsenheden er dækket af sengetøj.	Sørg for, at strømforsyningsenheden gøres fri af sengetøj, klæder eller andre objekter, der kan komme til at dække den.
Viser meddelelsen: Tilstoppet slange; efterse slange	
Luftslangen er blokeret.	Kontrollér luftslangen og fjern eventuel blokering. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet.
Viser meddelelsen: Stor læk, efterse systeminstallation og alle forbindelser	
Der er for stor lækage.	Justér maskens og hovedbåndets position. Luftslangen er ikke sat ordentligt i. Tilslut den ordentligt i begge ender.
Følgende meddelelse vises på LCD-skærmen, når du har forsøgt at opdatere indstillingerne eller kopieret data over på SD-kortet: Kortfejl; tag SD-kort ud, og kontakt servicetekniker	
SD-kortet er ikke indsat korrekt.	Kontrollér, at SD-kortet er indsat korrekt.
Du kan have fjernet SD-kortet, før indstillingerne blev kopieret til apparatet.	Indsæt SD-kortet igen, og vent på, at udgangsskærmen eller meddelelsen "Indstillinger er opdateret. Tryk på en vilkårlig tast" vises på LCD-skærmen.
	Bemærk: Denne meddelelse vises kun en gang. Hvis du genindsætter SD-kortet, efter at du har opdateret dine indstillinger, vil meddelelsen ikke blive vist igen.

Følgende meddelelse vises IKKE på LCD-skærmen, efter du har forsøgt at opdatere indstillingerne med SD-kortet: Indstillinger er opdateret. Tryk på en vilkårlig tast

Indstillingerne blev ikke opdateret.

Kontakt behandleren/serviceleverandør med det samme.

Generelle tekniske specifikationer

Strømforsyning

90 W strømforsyningsenhed

Input-område: 100-240 V, 50-60 Hz, 115 V, 400 Hz nominelt til brug ombord på fly

Typisk strømforbrug: 70 W (80 VA)

Maksimalt strømforbrug: 110W (120 VA)

30W strømforsyningsenhed

Input-område: 100-240 V, 50-60 Hz, 115 V, 400 Hz nominelt til brug ombord på fly

Typisk strømforbrug: 20W (40 VA)

Maksimalt strømforbrug: 36W (75 VA)

90 W DC/DC-konverter

Nominale input: 12 V, 24 V

Typisk strømforbrug: 70 W

Maksimalt strømforbrug: 110W

Miljøforhold

Driftstemperatur: +5 °C til +35 °C

Bemærk: *Indåndingsluften, som behandlingsapparatet tilfører, kan være højere end stuetemperaturen. Apparatet fungerer fortsat sikkert under ekstreme omgivende temperaturforhold (40 °C).*

Luftfugtighed under drift: 10 til 95 % ikke-kondenserende

Driftshøjde: Havets overflade til 2591 m

Temperatur under opbevaring og transport: -20 °C til +60 °C

Luftfugtighed under opbevaring og transport: 10 til 95 % ikke-kondenserende

Anvendelse på fly

ResMed bekræfter, at apparatet/terne opfylder kravene fra Federal Aviation Administration (FAA, den amerikanske flyadministration) (RTCA/DO-160, afsnit 21, kategori M) for alle faser af flyrejser.

Elektromagnetisk kompatibilitet Produktet overholder alle gældende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC60601-1-2 for bopæls-, kommercielt og let industrimiljø. Det anbefales at holde mobile kommunikationsapparater mindst 1 m væk fra apparatet.
Oplysninger vedr. elektromagnetiske emissioner og immunitet for dette ResMed-apparat findes på www.resmed.com på siden Products (produkter) under **Service and Support**. Klik på pdf-filen for dit sprog.

IEC 60601-1 klassifikation Klasse II (dobbelt isolering), Type BF

Tekniske specifikationer for Auto 25

Tryk- og flowtilstand Trykomsråde (målt ved masken) under drift: 4-20 cm H₂O (CPAP); 4-25 cm H₂O (VPAP)
Maksimalt steady state-tryk ved en enkelt funktionsfejl: 30 cm H₂O – hvis trykket overskrides i > 6 sek.; 40 cm H₂O – hvis trykket overskrides i > 1 sek.
Trykmålingstolerance: ± 0,5 cm H₂O ± 4 % af aflæsningsresultatet
Flowmålingstolerance: ±6 l/min. eller 10 % af målingen (største værdi) ved 0-150 l/min. positivt flow

Funktionsaflæsning **CPAP-funktion**
Indstillet tryk: 4-20 cm H₂O
VAuto-funktion
Min EPAP: 4 cm H₂O; Max IPAP: 25 cm H₂O; Trykstøtte: 0 til 10 cm H₂O.

Fysisk Nominelle dimensioner (L x B x H): 153 mm x 140 mm x 86 mm
Vægt: 835 g

Kabinetkonstruktion: Thermoplast med flammehæmmende virkning
Luftudtag: 22 mm konisk luftudtag (opfylder kravene i ISO 5356-1:2004)

Luftfilter Hypoallergent luftfilter: Acryl- og polypropylenfibre i polypropylenbærestof
Standard luftfilter: Uvævet polyesterfibre

Lyd ANGIVNE TOCIFREDE VÆRDIER FOR STØJEMISSION i overensstemmelse med ISO 4871:1996	Trykniveau (CPAP-funktion)	
	Med SlimLine luftslange:	26 dBA med en usikkerhed på 2 dBA som målt i overensstemmelse med EN ISO 17510-1:2009
	Med Standard luftslange:	27 dBA med en usikkerhed på 2 dBA som målt i overensstemmelse med EN ISO 17510-1:2009
	Med enten SlimLine eller Standard luftslange og H5i:	28 dBA med en usikkerhed på 2 dBA som målt i overensstemmelse med EN ISO 17510-1:2009
	Strømniveau (CPAP-funktion)	
	Med SlimLine luftslange:	34 dBA med en usikkerhed på 2 dBA som målt i overensstemmelse med EN ISO 17510-1:2009
	Med Standard luftslange:	35 dBA med en usikkerhed på 2 dBA som målt i overensstemmelse med EN ISO 17510-1:2009
	Med enten SlimLine eller Standard luftslange og H5i:	36 dBA med en usikkerhed på 2 dBA som målt i overensstemmelse med EN ISO 17510-1:2009
Supplerende ilt	Anbefalet maksimal, supplerende ilttilførsel: 4 l/min.	

Tekniske specifikationer for luftslange

Luftslange	Materiale	Længde	Indvendig diameter
ClimateLine opvarmet luftslange	Fleksibel plastik og elektriske komponenter	2 m	15 mm
ClimateLine ^{MAX} opvarmet luftslange	Fleksibel plastik og elektriske komponenter	1,9 m	19 mm
SlimLine luftslange	Fleksibel plastik	1,8 m	15 mm
Standard luftslange	Fleksibel plastik	2 m	19 mm
3 m luftslange	Fleksibel plastik	3 m	19 mm

Afbrydelsestemperatur for opvarmet luftslange ≤ 41 °C

Bemærk:

- *Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse specifikationer uden varsel.*
- *De viste indstillinger for temperatur og relativ fugtighed for Klimakontrol er ikke målte værdier.*
- *Konsultér klinikeren/behandleren for anvendelse af SlimLine luftslinger sammen med andre apparater end S9 eller H5i.*

- Den elektriske forbindelsesende på den opvarmede luftslange er kun kompatibel med H5i-luftudsugning og må ikke fastgøres til apparatet eller masken.

Fugterens ydelse


Følgende indstillinger er blevet testet ved en omgivende temperatur på 22 °C:

Masketryk cm H ₂ O	RF-output %		Nominelt systemoutput AH ^a , BTPS ^b	
	Indstilling 3	Indstilling 6	Indstilling 3	Indstilling 6
3	90	100	10	18
10	95	100	11,5	21
20	95	100	11	18
25	100	100	12	13,5

a. AF – Absolut luftfugtighed i mg/l.

b. BTPS - Body Temperature Pressure Saturated (mættet vanddamps tryk ved kropstemperatur)

Pneumatisk flowsti

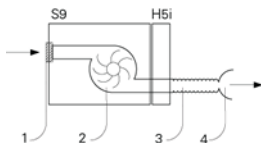

1. Luftindtagsfilter
2. Blæser
3. Luftslange
4. Maske

Flow (maksimum) ved indstillet tryk

Følgende er målt ved enden af den specificerede luftslange:

Tryk, cm H ₂ O	Auto 25 og standard luftslange, l/min.	Auto 25, H5i og standard luftslange, l/min.	Auto 25 og SlimLine luftslange, l/min.	Auto 25, H5i og ClimateLine opvarmet luftslange, l/min.
4	200	170	195	170
8	200	170	190	170
12	200	170	184	170
16	200	170	175	170
20	190	170	168	161
25	180	161	144	125

Viste værdier

Værdi	Interval	Nøjagtighed	Skærmens billedopløsning
Trykføler ved luftudtag			
Tryk	4-25 cm H ₂ O	±0,5 cm H ₂ O (±4 % af målt værdi)	0,1 cm H ₂ O
Flowafledte værdier^a			
Lækage	0–200 l/min.	^b	1 l/min.
Tidalvolumen	0-4000 ml	±10 %	1 ml
Respirationsfrekvens	0-50 BPM	±1 BPM ^c	1 BPM
Minutventilation	0–30 l/min.	±10 %	0,1 l/min.
Ti gennemsnit	0–4,0 sek.	±10 %	0,2 sek.

a. Resultaterne kan være unøjagtige ved tilstedeværelse af lækager eller supplerende ilt.

b. De viste værdier er anslåede værdier. De er kun beregnet til at angive tendensen.

c. Resultaterne kan være unøjagtige, hvis tidalvolumen er under 50 ml.

Tryknøjagtighed

Maksimal statisk trykvariation ved 10 cm H₂O i henhold til EN ISO 17510 -1:2009

	Standard luftslange	SlimeLine luftslange
Uden H5i	9,89 cm H ₂ O til 9,97 cm H ₂ O	9,76 cm H ₂ O til 9,87 cm H ₂ O
Med H5i	9,82 cm H ₂ O til 9,98 cm H ₂ O	9,78 cm H ₂ O til 9,88 cm H ₂ O





Maksimal dynamisk trykvariation i henhold til ISO 17510-1:2009




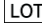

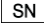
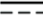
Tryk (cm H ₂ O)	10 BPM	15 BPM	20 BPM
	Auto 25 og standard luftslange uden H5i / Auto 25 og standard luftslange med H5i		
4	0,18 / 0,18	0,30 / 0,30	0,51 / 0,51
8	0,21 / 0,20	0,26 / 0,24	0,38 / 0,36
12	0,21 / 0,20	0,26 / 0,23	0,34 / 0,31
16	0,22 / 0,21	0,27 / 0,26	0,36 / 0,33
20	0,23 / 0,22	0,26 / 0,28	0,38 / 0,35
25	0,30 / 0,31	0,54 / 0,50	0,74 / 0,71







Tryk (cm H ₂ O)	10 BPM	15 BPM	20 BPM
	Auto 25 og SlimLine luftslange uden H5i / Auto 25 og SlimLine luftslange med H5i		
4	0,22 / 0,20	0,28 / 0,29	0,47 / 0,53
8	0,23 / 0,19	0,32 / 0,29	0,41 / 0,42
12	0,22 / 0,21	0,35 / 0,29	0,41 / 0,45
16	0,22 / 0,23	0,41 / 0,33	0,44 / 0,50
20	0,24 / 0,27	0,37 / 0,34	0,48 / 0,50
25	0,31 / 0,31	0,50 / 0,54	0,78 / 0,84

Symboler

Følgende symboler kan forekomme på produktet eller pakningen.

 Forsigtig;  Læs brugsanvisningen inden brug; **IP21** Beskyttelse mod indføring af fingre og mod lodret dryppende vand; **IP20** Ikke dryptæt;  Type BF udstyr;  Klasse II-udstyr;

 Start/stop;  Producent;  EU's RoHS direktiv (om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer);  LOT Partinummer;  REF Katalognummer;  SN Serienummer;  Jævnstrøm;

 Lås/lås op;  Kinesisk logo 1 for forureningskontrol;   Kinesisk logo 2 for forureningskontrol;  **EC REP** Autoriseret repræsentant i EU;  Holdes tør;

Miljøoplysninger

Iht. EU-direktiv WEEE 2002/96/EF skal elektriske og elektroniske komponenter bortskaffes på korrekt måde. Dette apparat skal bortskaffes separat og ikke sammen med usorteret kommunalt affald. Ved bortskaffelse af apparatet skal de hensigtsmæssige lokale indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingsystemer anvendes. Anvendelse af disse indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingsystemer har til formål at reducere belastningen af de naturlige ressourcer og forhindre farlige stoffer i at skade miljøet.

Hvis du har brug for information om disse affaldssystemer, bedes du kontakte de lokale affaldsmyndigheder. Symbolet med den overstregede skraldespand er en påmindelse om at benytte ovennævnte affaldsfaciliteter. Oplysninger om indsamling og bortskaffelse af ResMed-apparatet fås ved at kontakte ResMed-kontoret, den lokale forhandler eller ved at gå ind på webstedet www.resmed.com/environment.

Service

Auto 25-apparatet er beregnet til at yde sikker og pålidelig funktion, når produktet benyttes i overensstemmelse med ResMeds anvisninger. ResMed anbefaler, at Auto 25-apparatet efterses og repareres på et autoriseret ResMed-servicecenter, hvis der findes tegn på slitage, eller der opstår problemer med apparatets funktion. Ellers skulle det generelt ikke være nødvendigt at vedligeholde og inspicere apparatet i den beregnede levetid på fem år.

Begrænset garanti

ResMed Ltd (herefter 'ResMed') garanterer, at produktet fra ResMed vil være uden defekter i materialer og udførelse fra købsdatoen og i den periode, der er angivet nedenfor.

Produkt	Garantiperiode
<ul style="list-style-type: none">• Maskesystemer (inklusive maskeramme, pude, hovedbånd og slanger) - bortset fra apparaterne til engangsbrug• Tilbehør - bortset fra apparaterne til engangsbrug• Fingerpulssensorer af flekstype• Vandbeholdere til fugter	90 dage
<ul style="list-style-type: none">• Batterier til brug i ResMed's interne og eksterne batterisystemer	6 måneder
<ul style="list-style-type: none">• Fingerpulssensorer af clipstype• Datamoduler til CPAP- og bi-level-apparater• Oximetre og oximeteradaptere til CPAP- og bi-level-apparater• Fugtere og vaskbare vandbeholdere til fugtere• Kontrolapparater til titrering	1 år
<ul style="list-style-type: none">• CPAP-, bilevel- og ventilationsapparater (inklusive eksterne strømforsyningsenheder)• Batteritilbehør• Bærbare diagnosticerings- og screeningsapparater	2 år

Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber. Den kan ikke overdrages.

Hvis produktet svigter ved almindelig brug, vil ResMed efter eget skøn reparere eller udskifte det defekte produkt eller en eller flere af dets komponenter.

Den begrænsede garanti dækker ikke: a) Beskadigelse som følge af forkert brug, misbrug, modifikationer eller ændringer af produktet; b) reparation udført af en servicevirksomhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af ResMed til at udføre sådan reparation; c) Skader eller kontamination som

skyldes røg fra cigaret, pipe eller cigar eller anden type røg; samt d) enhver skade forårsaget af vand, der spildes på eller ind i elektronisk udstyr.

Garantien gælder ikke for produkter, der sælges eller videresælges uden for det område, hvor de oprindeligt blev købt.

Garantikrav for defekte produkter skal indgives af den oprindelige kunde på købsstedet.

Denne garanti erstatter alle andre udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Visse lande eller områder tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

ResMed er ikke ansvarlig for nogen tilfældig eller efterfølgende skade, der hævdes at være et resultat af salg, installation eller brug af noget som helst produkt fra ResMed. Visse lande eller områder tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, så den ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, som kan variere fra land til land. Nærmere oplysning om rettigheder under garantien fås ved at kontakte den lokale ResMed-forhandler eller det lokale ResMed-kontor.



ADVARSLER

- Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug.
- Dette apparat må kun bruges efter lægens eller behandlerens anvisninger.
- Apparatet må kun anvendes til den tilsigtede anvendelse, som beskrives i denne brugervejledning. Anvisninger fra den læge, der ordinerede behandlingen, går altid frem for de råd, der gives i denne vejledning.
- Hvis der bemærkes eventuelle uforklarlige ændringer i apparatets ydeevne, hvis det laver usædvanlige eller skarpe lyde, hvis apparatet eller strømforsyningen tabes eller håndteres forkert, hvis der spildes vand ind i huset, eller hvis huset er i stykker, skal brugen af apparatet indstilles, og nærmeste ResMed serviceafdeling kontaktes.
- Risiko for elektrisk stød. Neddyb ikke apparatet, fugteren, strømforsyningen eller strømkablet i vand. Frakobl i tilfælde af spild apparatet fra strømforsyningen og lad delene tørre. Tag altid stikket ud af stikkontakten inden apparatet rengøres, og sørg for, at alle dele er tørre, inden stikket sættes i stikkontakten igen.
- Eksplosionsfare – må ikke anvendes i nærheden af brændbare anæstetika.
- Sørg for, at eLedningen og stikket er i god stand, og at udstyret ikke er beskadiget.
- Hold eLedningen borte fra varme overflader.

- Dette apparat må kun anvendes med masker (og tilslutninger¹), der er anbefalet af ResMed, af en læge eller åndedræststerapeut. Man bør ikke bruge maske, medmindre der er tændt for apparatet. Efter tilpasning af masken bør man sikre sig, at apparatet blæser luft. Maskens lufthul(ler) må aldrig blokeres.

Forklaring: Apparatet er beregnet til at bruges med specielle masker (eller tilslutninger), som har lufthuller for at tillade kontinuerligt luftflow ud af masken. Når der er tændt for apparatet, og det fungerer, som det skal, skyller ny luft fra apparatet den udåndede luft ud gennem maskens huller. Når apparatet derimod ikke er i gang, vil der ikke blive leveret tilstrækkelig frisk luft gennem masken, og den udåndede luft kan blive indåndet igen. Genindånding af udåndet luft i mere end nogle få minutter kan i visse tilfælde medføre kvælning. Dette gælder for de fleste modeller af CPAP- eller bi-level-apparater.

- Ilt nærer forbrænding. Der må ikke anvendes ilt, mens der ryges eller ved tilstedeværelse af åben ild.
- Sørg altid for at apparatet er tændt, og at der genereres luftflow, inden der tændes for iltforsyningen. Husk altid at slukke for iltforsyningen inden apparatet slukkes, sådan at der ikke akkumuleres ilt inde i selve apparatet, hvilket kan medføre risiko for brand.
- Du bør ikke lade et stort stykke af luftslangen ligge i sengens hovedende. Slangen kan sno sig rundt om hoved eller hals, mens du sover.
- Der må ikke anvendes elektrisk ledende eller antistatiske luftslinger.
- Luftslangen må ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på beskadigelse.
- Der må kun anvendes ResMed-luftslinger og -udstyr til dette apparat. Andre typer luftslinger eller udstyr kan ændre det tryk, du rent faktisk modtager, og gøre behandlingen mindre effektiv.
- Brug kun ResMed 90 W eller 30 W strømforsyningsenheder. Brug 90 W strømforsyningsenheden til at strømføre systemet bestående af apparatet, H5i, luftslange, DC/DC-konverter og batteripakning. 30 W strømforsyningsenheden er udformet til kun at strømføre apparatet og anbefales til rejser.
- Kun ResMed-produkter er beregnet til at blive koblet til modultilslutningsporten. Tilslutning af andre apparater kan beskadige apparatet.
- Blokering af luftslangen og/eller luftindsugningen på apparatet under drift kan føre til overophedning af apparatet.

¹ Der kan indkorporeres porte i masken eller tilslutninger i nærheden af masken.

FORSIGTIGHEDSREGLER

- Apparatets hus må ikke åbnes. Det indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Reparation og servicering må kun udføres af en autoriseret servicerepræsentant for ResMed.
- Der må ikke anvendes blegemiddel, klorin, alkohol eller aromabaserede opløsninger, fugtgivende eller antibakteriel sæbe eller duftende olier til rengøring af apparatet, fugteren eller luftslangerne. Sådanne opløsninger kan beskadige produkterne og mindske deres holdbarhed.
- Ukorrekt systemopsætning kan resultere i ukorrekt måling af masketryk. Sørg for, at systemet opsættes korrekt.
- Pas på ikke at anbringe apparatet, hvor det kan blive væltet, eller hvor man kan komme til at snuble over ledningen.
- Sørg for, at området rundt om apparatet er tørt og rent, og at der ikke er sengetøj eller andre ting, der kunne blokere luftindtaget eller dække strømforsyningsenheden.
- Sørg for, at apparatet er beskyttet mod vand, hvis det anvendes udendørs. Opbevar apparatet i S9-rejsetasken under transport.



Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9, H5i, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are trademarks of ResMed Ltd. S9, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2017 ResMed Ltd. 368696/3 2017-11

