



Le masque facial compact conçu pour convenir à tout le monde

Le masque AirFit F20 dispose d'un coussin en silicone innovant InfinitySeal: testé pour résister aux plus hautes pressions de traitement, il est conçu pour s'adapter confortablement à tous les types et tailles de visages. Il va répondre aux attentes des patients qui recherchent un masque moins claustrophobe, qui permet une grande liberté visuelle.



Conçu pour tous

Selon une étude internationale, 96,5% des patients ont pu confortablement mettre en place le masque AirFit F20^{1,2,3,4}. Choisissez le masque AirFit F20 et vos patients peuvent retourner chez eux en toute confiance.

Étanche

Le masque AirFit F20 bénéficie de la nouvelle technologie InfinitySeal développée pour tolérer un mauvais positionnement, pour fonctionner à des pressions thérapeutiques élevées et pour s'adapter aux mouvements des patients au cours de la nuit.

Confortable

L'entourage en tissu, confortable et flexible, apporte à la fois une grande stabilité et un champ de vision dégagé.

Grâce à la technologie InfinitySeal, le masque AirFit F20 s'adapte aux contours du visage de chaque patient, afin d'offrir confort et stabilité en toute confiance.



Liberté visuelle

Stabilité ou liberté visuelle ? Les patients n'ont pas à choisir. Le masque combine champ de vision dégagé, stabilité et confort.

Entourage doux

Spécifiquement conçu pour apporter plus de douceur, le harnais aide les patients à se sentir plus rapidement à l'aise avec leur traitement.

Rapide à mettre en place

Moins d'une minute est nécessaire pour mettre en place le masque AirFit F20¹. Mettre et enlever son masque est facile et intuitif grâce aux clips magnétiques qui guident le harnais vers l'entourage du masque.

Étanchéité fiable


Offrez une bonne étanchéité dès le début du traitement grâce à la nouvelle bulle InfinitySeal conçue pour prévenir les fuites, tolérer les erreurs de mise en place et être étanche même avec des variabilités de pression.

Entourage doux et flexible

S'adaptant à un large éventail de visages, l'entourage en tissu apporte douceur et confort sur le visage.

Liberté de mouvements


Le coude à retrait rapide permet une connexion facilitée notamment la nuit et une rotation à 360° offrant une grande liberté de mouvements.

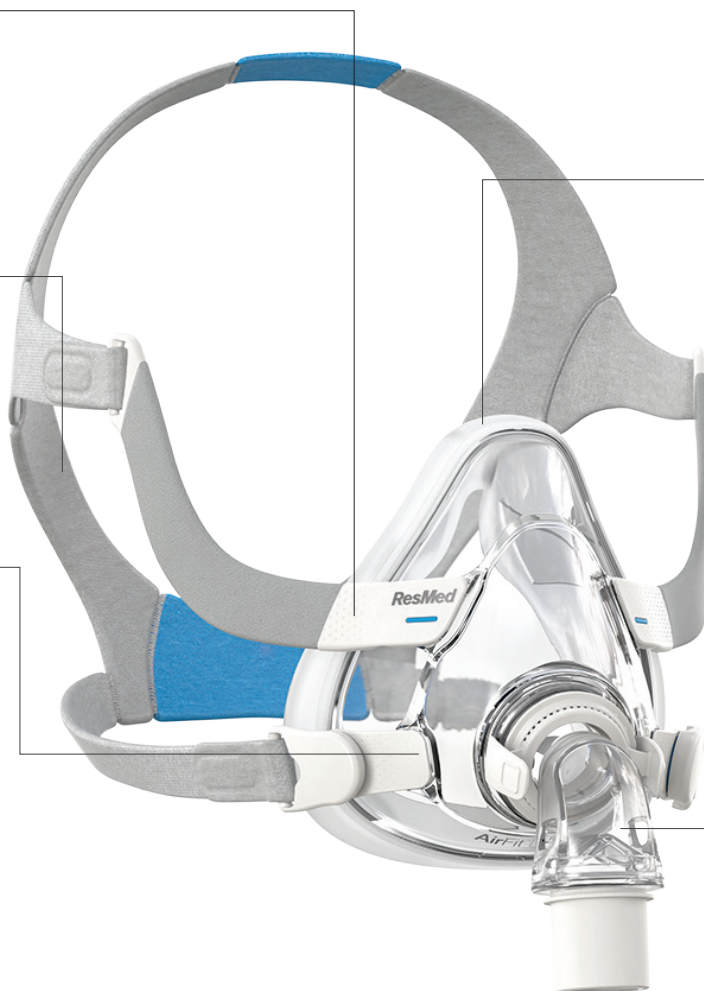


AirFit F20 for Her

Le masque AirFit F20 for Her est spécifiquement pensé pour les femmes, avec sa taille plus petite et plus adaptée à la morphologie féminine.

86% des patients ont préféré le masque AirFit F20 en termes d'étanchéité en comparaison avec le masque facial leader sur le marché¹.

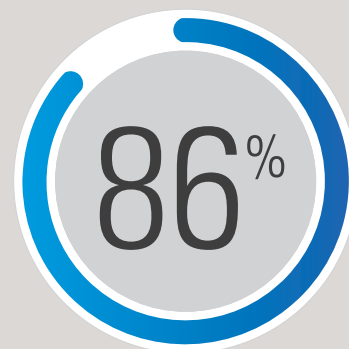

La technologie de la bulle évolue:
plusieurs épaisseurs pour plus de confort et de stabilité

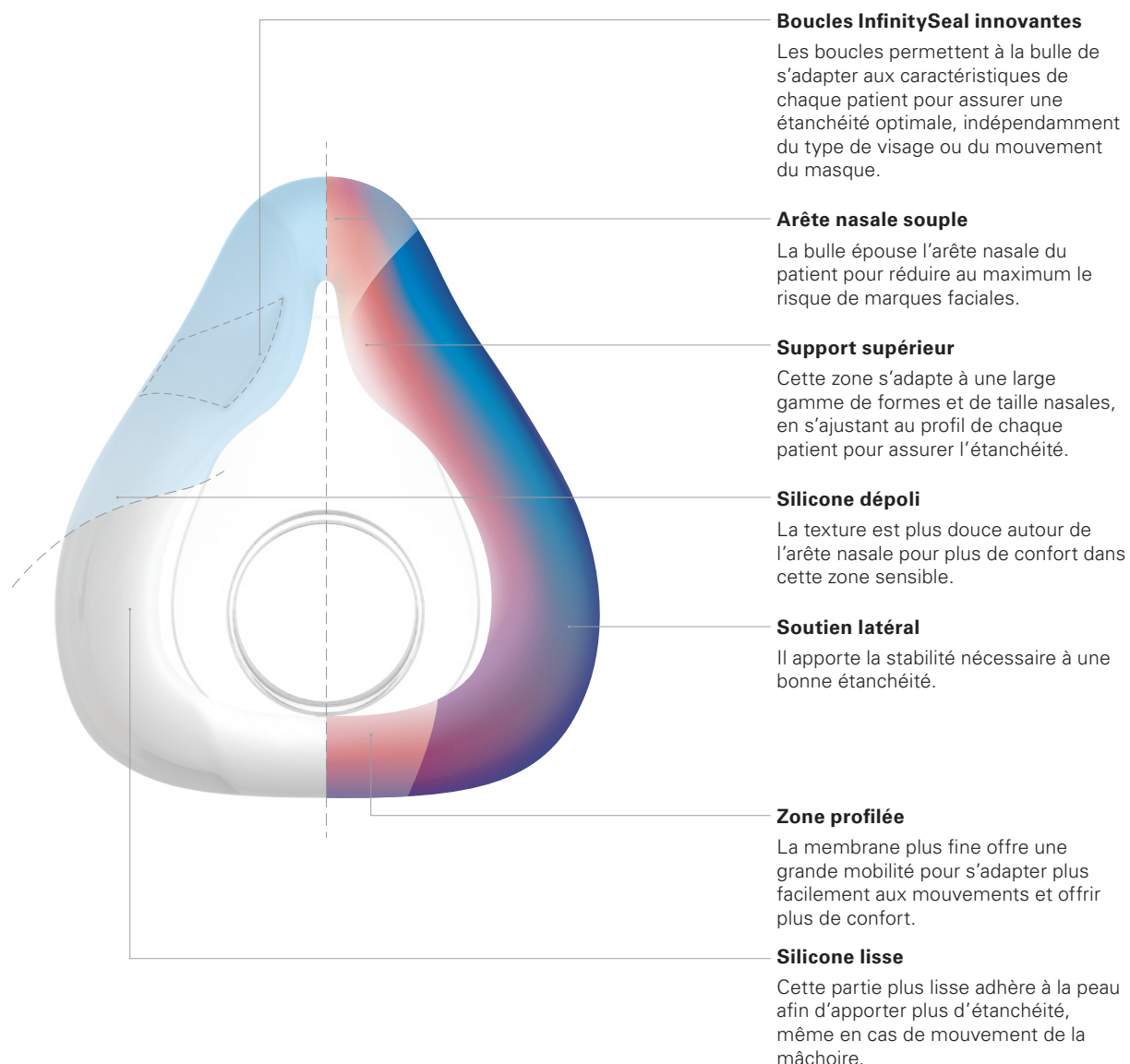


Confort


Stabilité



Selon une étude internationale, 96,5% des patients ont pu mettre en place le masque AirFit F20 et obtenir une bonne étanchéité^{1,2,3,4}.

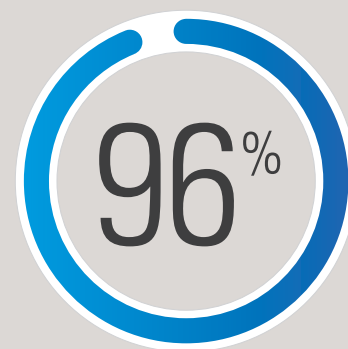

Peu de composants pour une utilisation facilitée

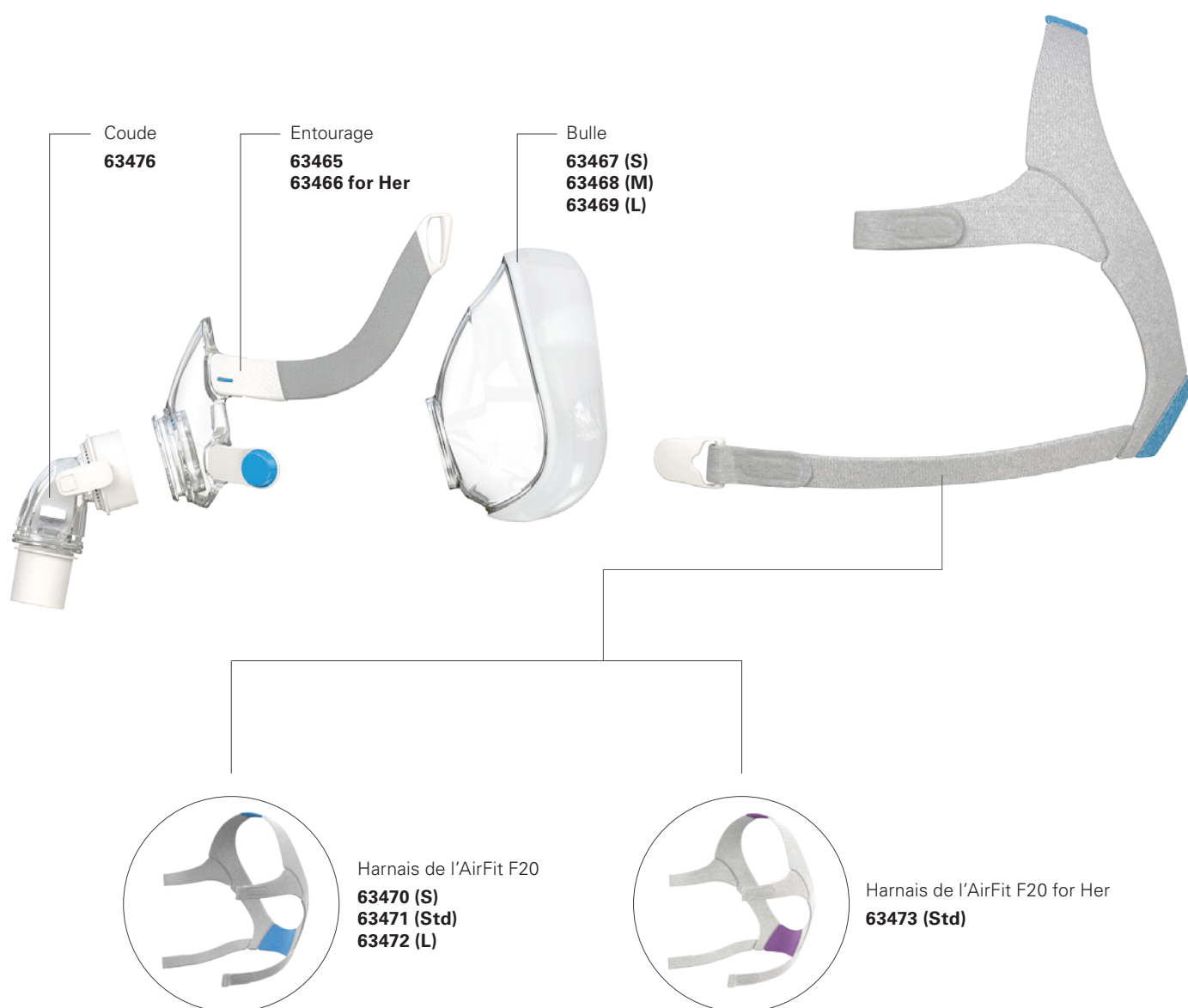


Choix de la taille

Le masque AirFit F20 possède trois tailles de bulles interchangeable - small, medium et large. Grâce à la conception modulaire de l'AirFit F20, chaque taille de bulle se fixe aisément à l'entourage. Il est ainsi facile d'échanger les bulles pour plus de flexibilité.

Afin de choisir la taille la plus adaptée, utilisez le gabarit de l'AirFit F20 comme guide.

Vous pouvez le télécharger sur le site [ResMed.com/AirFitF20](https://www.ResMed.com/AirFitF20)

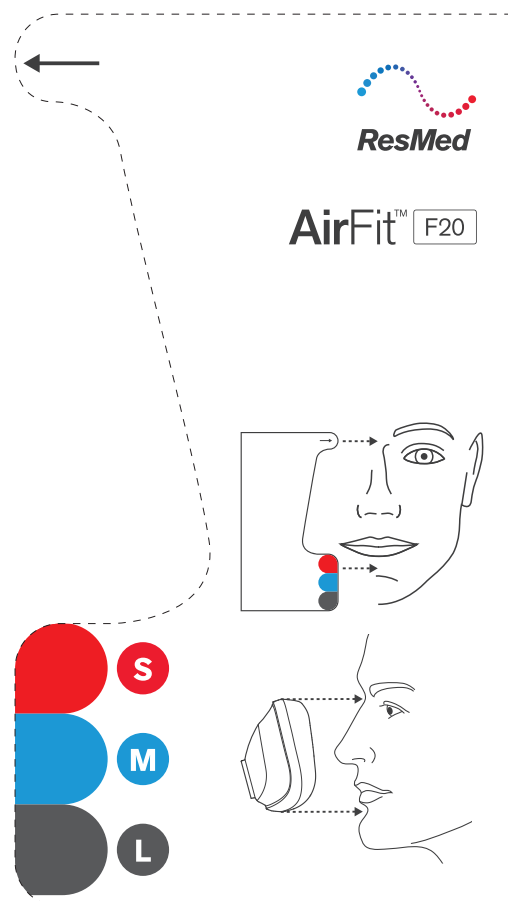

Codes produits

AirFit F20: Small	63405
AirFit F20: Medium	63406
AirFit F20: Large	63407
AirFit F20 for Her: Small	63408
AirFit F20 for Her: Medium	63409



Mise en place du masque AirFit F20



- Assurez-vous que les clips magnétiques des sangles inférieures soient bien détachés.
- Si les clips sont connectés, détachez-les de l'entourage.



- Positionnez le haut de la bulle avec le haut de l'arête nasale.
- Faites passer le harnais par-dessus votre tête en vous assurant que le logo ResMed soit tourné vers l'extérieur.



- Passez les sangles inférieures sous vos oreilles et attachez les clips magnétiques sur les cotés de l'entourage.



- Détachez les bandes adhésives des sangles supérieures du harnais.
- Ajustez les sangles uniformément jusqu'à ce que le masque soit confortable et stable, puis rattachiez les bandes adhésives.



- Faites de même avec les attaches adhésives des sangles inférieures du harnais.



- Mettez votre appareil en marche et connectez le tuyau à air au masque.
- Finalisez l'ajustement de la bulle et du harnais jusqu'à ce que le masque soit confortable.

Remarque : pour les instructions d'utilisation complètes, veuillez consulter le guide d'utilisation.



Options additionnelles

- Le patient peut ajuster la sangle inférieure du harnais au-dessus ou en-dessous de ses cheveux, selon sa préférence.

1 Etude interne ResMed menée du 26.04.2016 au 27.05.2016, durant laquelle 22 patients ResMed ont comparé le masque leader sur le marché avec le masque AirFit F20. Etude patient préliminaire - données sur fichier; ID A3810791.
 2 Etude interne ResMed concernant la mise en place du masque AirFit F20, menée du 30.03.2016 au 04.04.2016 sur 27 patients ResMed et non-ResMed. Etude patient préliminaire - données sur fichier; ID A3751086.
 3 Etude internationale interne ResMed concernant la mise en place du masque AirFit F20, menée du 11.04.2016 au 15.04.2016 sur 34 patients ResMed et non-ResMed. Etude patient préliminaire - données sur fichier; ID A3774922.
 4 Etude internationale interne ResMed concernant la mise en place du masque AirFit F20, menée du 06.06.2016 au 22.06.2016 sur 90 patients ResMed et non-ResMed. Etude patient préliminaire - données sur fichier; ID A3830701.



ResMed Pty Ltd
 1 Elizabeth Macarthur Drive
 Bella Vista NSW 2153 Australia

Distribué par
 [CE] [REP] ResMed Schweiz GmbH,
 Viaduktstrasse 40, 4051 Bâle, Suisse.

AirFit et InfinitySeal sont des marques déposées de ResMed. Les spécifications peuvent changer sans préavis.
 © 2016 ResMed. 1019686/1 2016-10

