




Reinigung des Standard- und QuietAir™-Kniestücks für AirFit F20/F30-Masken

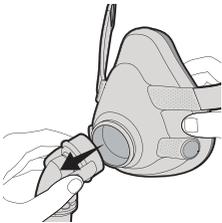

1 Um das Kniestück von der Maske zu entfernen, drücken Sie die beiden seitlichen Knöpfe und ziehen Sie das Kniestück von der Maske ab.

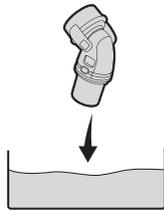

2 Weichen Sie das Kniestück mit einem milden Flüssigreiniger für etwa 10 Minuten in warmem Wasser (ca. 30°C) ein.

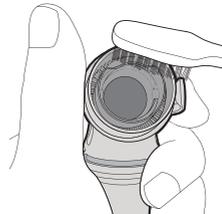

3 Schütteln Sie das Kniestück für mindestens eine Minute kräftig im Wasser und reinigen Sie es per Hand mit einer weichen Bürste. Achten Sie dabei besonders auf alle Verbindungsteile, Ausatemöffnungen und Ventile.

4 Spülen Sie das Kniestück gründlich unter fließendem Wasser ab.

5 Lassen Sie das Kniestück lufttrocknen, setzen Sie es dabei nicht direktem Sonnenlicht aus.

Wenn das Kniestück nicht erkennbar sauber ist, wiederholen Sie die Reinigungsschritte.

VORSICHT: Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Kniestück vollkommen trocken ist, bevor es zum Einsatz kommt.

Wie oft sollte ich das Kniestück reinigen?

Wir empfehlen eine **tägliche Reinigung, nach jedem Einsatz**.

*Hinweis: Auch die übrige Maske (Kissen und Rahmen) sollte täglich gereinigt werden.
Das Kopfband sollte wöchentlich gereinigt werden.*

Was passiert, wenn ich das Kniestück nicht reinige?

Reinigen Sie Ihre Maske und die Zubehörteile regelmäßig; so erhalten Sie die Qualität Ihrer Maske und beugen der Ausbreitung von Keimen vor, die Ihre Gesundheit beeinträchtigen könnten.

Was sollte ich tun, wenn mein Kniestück beschädigt aussieht?

Setzen Sie sich mit Ihrem Leistungserbringer in Verbindung. Eventuell muss das Kniestück ersetzt werden.



Befolgen Sie die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung. Die leicht verständlichen Anleitungsvideos finden Sie auf der Masken Support Seite auf [ResMed.com](https://www.resmed.com).