


Demontering av AirFit P10




- Mens du holder øverst i maskeslangen, klem og trekk putene vekk fra maskerammen.

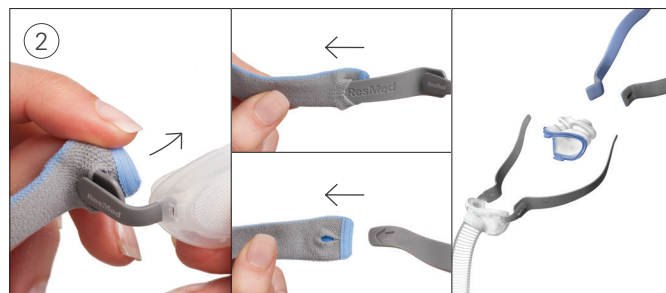


- Dra utover og før stoffet over kanten på begge stabilisatorene. Masken er nå demontert.


Montering av AirFit P10

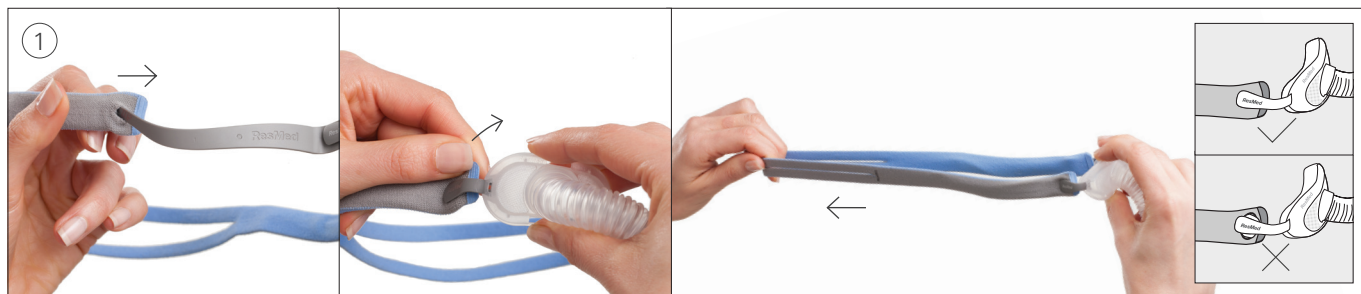

- Før hodestroppen over stabilisatorene gjennom hullet i stoffet, med den grå siden vendt utover. Sikre hodestroppen ved å tre hver stoffende oppover og rundt kanten på stabilisatorene. Mens du holder i de delte stroppene, trekk hodestroppen fra stabilisatorene for å sikre at de sitter godt rundt kantene. Se til at hodestroppen ikke er vridd.

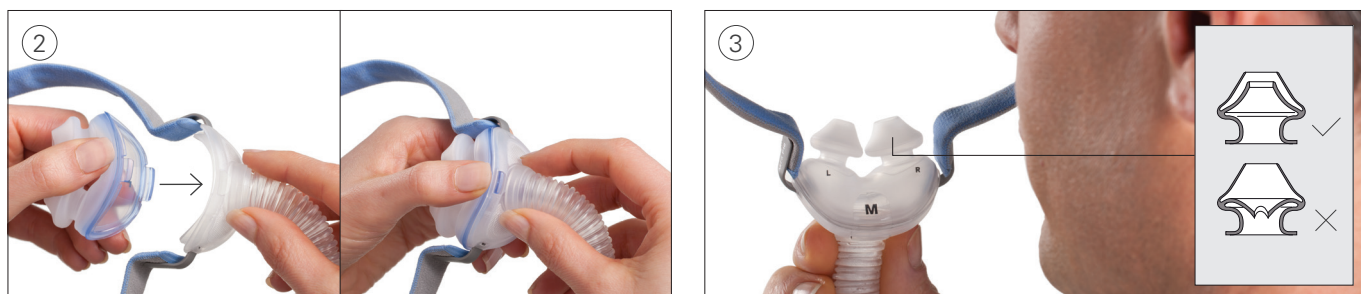

- Fest putene til maskerammen ved å sette det korteste klipset inn i det øverste sporet, og det lengste klipset inn i det nederste sporet på maskerammen. Masken er nå satt sammen.

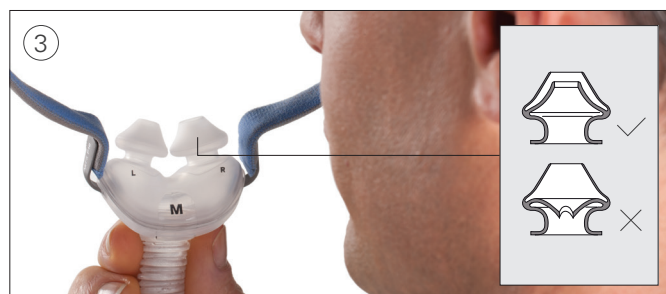

- Sikre at de indre veggene til neseputene ikke er klemt sammen eller har falt sammen. Hvis de er det, klem hver nesepute slik at de går tilbake til sin opprinnelige form.

Merk: Se i brukerhåndboken til AirFit P10 for fullstendig brukerveiledning.

ResMed.com