


Mirage Quattro™

MÁSCARA FACIAL

Manual de Ajuste



- 1
- Gire o botão MicroFit até a posição 24, na qual o suporte para a testa fica totalmente estendido.

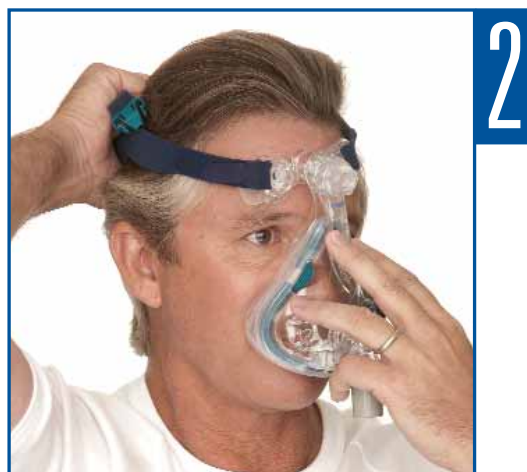

- 2
- Desprenda uma presilha do arnês, coloque a máscara sobre o rosto e puxe o arnês sobre a cabeça.



- 3
- Passe as tiras inferiores por baixo das orelhas.
 - Prenda a presilha inferior do arnês, certificando-se de encaixá-la bem.



- 4
- Solte as pontas de Velcro™ e puxe uniformemente as tiras superiores do arnês sem perder o conforto.
 - Não aperte as tiras em demasia.



- 5
- Solte as pontas de Velcro e puxe uniformemente as tiras inferiores do arnês sem perder o conforto.
 - Não aperte as tiras em demasia.



- 6
- Conecte o tubo de ar principal à peça giratória.
 - Ligue o gerador de fluxo.
 - Gire o botão MicroFit até que a máscara fique posicionada uniforme e confortavelmente sobre o rosto.
 - Se sentir alguma fuga de ar, reajuste o arnês.

⚠ Para obter detalhes, consulte o *Manual do Usuário da Máscara Facial Mirage Quattro*.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (chamada grátis), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (chamada grátis). Escritórios nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Brasil, Cingapura, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hong Kong, Japão, Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia, Suíça (ver detalhes no site). Protegidos pelas patentes: AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Outras patentes pendentes. Protegidos pelos registros de projetos: AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Outros pendentes. Mirage e Mirage Quattro são marcas comerciais da ResMed Ltd e Mirage é uma marca registrada na Agência de Registros e Patentes dos Estados Unidos. Velcro é uma marca comercial da Velcro Industries B.V. © 2007 ResMed Ltd. 1011549/1 07 03