

## Mirage Micro™

MÁSCARA NASAL

### Manual de Ajuste



- Gire o botão MicroFit™ até a posição 24, na qual o suporte para a testa fica totalmente estendido.



- Desprenda uma presilha do arnês, coloque a máscara sobre o rosto e puxe o arnês sobre a cabeça.



- Passe as tiras inferiores por baixo das orelhas.
- Prenda a presilha inferior do arnês, certificando-se de encaixá-la bem.



- Solte as pontas de Velcro™ das tiras superiores, puxe uniformemente as tiras do arnês até que a posição seja confortável, e volte a prender o Velcro.
- Não aperte as tiras em demasia.



- Repita a etapa 4 com as tiras inferiores do arnês.
- Conecte uma das extremidades do tubo de ar à peça giratória e a outra ao gerador de fluxo.
- Ligue o gerador de fluxo.



- Quando estiver deitado, gire o botão MicroFit até que a máscara fique posicionada uniforme e confortavelmente sobre o rosto.
- Se sentir alguma fuga de ar, reajuste o botão e/ou o arnês.

⚠ Para obter detalhes, consulte o *Manual do Usuário da Máscara Nasal Mirage Micro*.

ResMed Corp Poway, CA, EUA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (chamada gratuita), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Austrália +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (chamada gratuita). Escritórios nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Brasil, China, Cingapura, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hong Kong, Índia, Japão, Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia, Suíça (ver detalhes no site). Protegido pelas patentes: AU 710733, AU 741003, AU 766623, AU 775051, AU 777033, AU 785376, CA 2261790, DE 29724224 U, EP 0956069, EP 1187647, EP 1187649, EP 1187650, EP 1314445, EP 1479406, HK 1057714, JP 3686609, NZ 513052, NZ 526165, NZ 526166, NZ 526168, US 6112746, US 6119693, US 6357441, US 6374826, US 6439230, US 6463931, US 6532961, US 6557556, US 6581594, US 6581602, US 6634358, US 6691708, US 6823865, US 6860269, US 6871649, US 6997188, US 7011090, US 7159587, US 7178527, US 7188620, US 7216647, US 7234466, US 7243651. Outras patentes pendentes. Protegido pelos registros de projeto: AU 304309, CN 200530117106.1, EP 366844, JP 1264474, NZ 406357, US D532512, US D547439, US D545960. Outros pendentes. Mirage e Mirage Micro são marcas comerciais da ResMed Ltd e Mirage se encontra registrada no Registro Norte-americano de Marcas e Patentes. Velcro é uma marca comercial da Velcro Industries B.V. © 2007 ResMed Ltd. 1012215/1 07 12