

Swift™ LT

NASENPOLSTERMASKE

Anleitung zum Anpassen der Nasenpolstermaske



1

- Halten Sie die Nasenpolster an Ihre Nase und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.
- Das Kopfband sollte in der Mitte zwischen Ohren und Augen sitzen.



2

- Passen Sie die oberen Kopfbänder an indem Sie sie gleichmäßig anziehen, bis sie bequem sitzen.
- Ziehen Sie die Bänder nicht zu stramm an.



3

- Wiederholen Sie Schritt 2 mit den hinteren Kopfbändern.
- Ziehen Sie die Bänder nicht zu stramm an.



4

- Stellen Sie mithilfe der Click-Fit-Justierung den passenden Nasenpolsterwinkel ein.
- Schließen Sie den Swift LT Verbindungsschlauch an den Atemschlauch des Geräts an.
- Schalten Sie das Gerät ein.



5

- Das Swift LT ist jetzt einsatzbereit.



Optional

- Alternative Schlauchpositionen können mithilfe des Schlauchhalters erzielt werden.



- Um den Schlauchhalter anzubringen, drücken Sie ihn in den oberen Kopfband-Clip.
- Befestigen Sie ihn je nach Flexibilitätsanforderungen entweder am Verbindungsschlauch oder am Atemschlauch des Geräts.
- Das Schlauchsystem kann sowohl seitlich vom Kopf als auch vor dem Gesicht positioniert werden.
- Falls die Nasenpolster unbequem an der Nase sind, stellen Sie den Schlauch am Schlauchhalter neu ein.

⚠ Mehr dazu finden Sie in der *Gebrauchsanweisung des Swift LT Nasenpolstersystems*.