

Swift™ LT

NÆSEPUDESYSTEM

Tilpasningsvejledning



- Hold næsepuderne ved næsen, og træk hovedbåndet over hovedet.
- Hovedbåndet skal sidde midt mellem ørerne og øjnene.



- Juster de øverste stopper ved at trække lige meget i dem, til masken sidder behageligt.
- De må ikke strammes for meget.



- Gentag anvisningen i punkt 2 med de bageste stropper.
- De må ikke strammes for meget.



- Brug vinkeljusteringen til at sætte næsepuderne i den bedste vinkel.
- Forbind den korte Swift LT slange til luftslangen på apparatet.
- Tænd apparatet.



- Swift LT næsemasken sidder nu, som den skal og er klar til brug.



Valgfrit

- Slangeholderen kan bruges til at anbringe slangen i andre stillinger.



- Den sættes på ved at skyde den ind i det øverste hovedbåndsspænde.
- Sæt enten den korte slange eller luftslangen fra apparatet i, alt afhængigt af hvor megen fleksibilitet der er behov for.
- Slangen kan anbringes ved siden af eller midt for ansigtet.
- Hvis næsepuderne trækker i næsen, skal slangen justeres ved slangeholderen.

⚠ Der er yderligere oplysninger i brugervejledningen til *Swift LT næsepudefsystem*.