

Kompatibilitätsliste Maske/Gerät

In diesem Dokument sind die mit den PAP-Geräten von ResMed kompatiblen Masken und gegebenenfalls die Maskeneinstellungen aufgeführt. Vollständige Anweisungen zur richtigen Verwendung dieser Geräte finden Sie in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen.

Hinweis: Einige Produkte sind nicht in allen Ländern erhältlich.

Full Face Masken 1

Gerät	AcuCare F1-4	AirFit™ F40 ⁴	AirFit™ F30i ¹ / AirFit™ F30i Non Magnetic ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her / AirFit™ F20 Non Magnetic	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	X	Nasenpolster	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	X	Nasenpolster	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
AirSense™ 11	N/V	Nasenpolster	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
AirMini™	X	X	X	✓	✓	✓	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Nasenpolster	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Nasenpolster	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Nasenpolster	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
Lumis™	N/V	Nasenpolster ³	Full Face ³	Full Face ³	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Nasenpolster	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
S9 Escape™	N/V	Nasenpolster	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Nasenpolster	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Nasenpolster	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.	
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.	
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.	
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.			

Gerät	AcuCare F1-4	AirFit™ F40 ⁴	AirFit™ F30i ¹ / AirFit™ F30i Non Magnetic ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her / AirFit™ F20 Non Magnetic	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.	
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Nasenpolster	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Nasenpolster	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Nasenpolster	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Nasenpolster	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
S9 VPAP™ Tx	N/V	Nasenpolster ²	Full Face ²	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	N/V
Stellar™	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V
Astral™	FULL FACE	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	N/V	N/V

¹ SmartStop funktioniert möglicherweise nicht wie beschrieben, wenn diese Maske mit bestimmten CPAP- oder BiLevel-Geräten verwendet wird.

² Ohne PAC- und iVAPS-Modi. Nur für Druckbereich 4–25 cm H2O kompatibel.

³ Diese Kombination aus Maske und Gerät wurde auf der Grundlage der Bewertung der Genauigkeit der Überwachung von Druck, Volumen, Atemminutenvolumen und Atemfrequenz sowie gegebenenfalls der Alarmer als sicher für die Anwendung eingestuft. Geringe Leistungsabweichungen können insbesondere bei höherem Druck oder Durchfluss beobachtet werden. Wie in der klinischen Praxis üblich, sollte die Wirksamkeit der Beatmung und der Alarmer vom Arzt überprüft werden.

⁴ Die SmartStart-Funktion funktioniert evtl. nicht wie beschrieben, wenn diese Maske mit bestimmten CPAP- oder BiLevel-Geräten verwendet wird.

N/V = Die Maske wurde nicht für dieses Gerät validiert.

✓ = Kompatibel X = Nicht kompatibel

Full Face Masken 2

Gerät	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirSense™ 11	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirMini™	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face

Gerät	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
Lumis™	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 Escape™	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS™ 2	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE ¹	FULL FACE
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
C-Series Tango™	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.					
S7™ Lightweight	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.					
S8 Escape™ II	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE ¹	FULL FACE
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Malibu	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
VPAP™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ S / VPAP™ ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 VPAP™ Tx	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Tx	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
Stellar™	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓

Gerät	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
VS III™	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE

Nasenmasken 1

Gerät	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30 ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	X	Nasal
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	X	Nasal
AirSense™ 11	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	N/V	Nasal
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
Lumis™	X	Nasenpolster ³	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal

Gerät	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30 ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	X	Nasenpolster ²	N/V	Nasenpolster	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
Stellar™	X	N/V	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER ¹	NASENPOLSTER ¹	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	N/V	N/V	Nasal	N/V	Nasal	Nasal

¹ SmartStop funktioniert möglicherweise nicht wie beschrieben, wenn diese Maske mit bestimmten CPAP- oder BiLevel-Geräten verwendet wird.

² Ohne PAC- und iVAPS-Modi. Nur für Druckbereich 4–25 cm H2O kompatibel.

³ Diese Kombination aus Maske und Gerät wurde auf der Grundlage der Bewertung der Genauigkeit der Überwachung von Druck, Volumen, Atemminutenvolumen und Atemfrequenz sowie gegebenenfalls der Alarmer als sicher für die Anwendung eingestuft. Geringe Leistungsabweichungen können insbesondere bei höherem Druck oder Durchfluss beobachtet werden. Wie in der klinischen Praxis üblich, sollte die Wirksamkeit der Beatmung und der Alarmer vom Arzt überprüft werden.

N/V = Die Maske wurde nicht für dieses Gerät validiert.

✓ = Kompatibel X = Nicht kompatibel

Nasenmasken 2

Gerät	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	Pädiatrisch	X	X	X	X	N/V	X	N/V	N/V	X
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	N/V	X	X	X	X	N/V	X	N/V	N/V	X
AirSense™ 11	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
Lumis™	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal

Gerät	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.						N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pädiatrisch	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pädiatrisch	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	Pädiatrisch	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
VPAP™ Tx	N/V	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL-ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	NASAL
Stellar™	Pädiatrisch	NASAL	NASAL	NASAL	ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Pädiatrisch	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = Die Maske wurde nicht für dieses Gerät validiert.

✓ = Kompatibel X = Nicht kompatibel

Nasenpolster

Gerät	AirFit™ P30i¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	Nasenpolster	X	Nasenpolster²	N/V	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	Nasenpolster	X	Nasenpolster²	N/V	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster

Gerät	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirSense™ 11	Nasenpolster	X	Nasenpolster	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Nasenpolster	X	Nasenpolster ²	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Nasenpolster	X	Nasenpolster ²	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Nasenpolster	X	Nasenpolster ²	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Nasenpolster ²	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
Lumis™	Nasenpolster ⁴	X	Nasenpolster ²	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Nasenpolster	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
S9 Escape™	Nasenpolster	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AutoSet CS™ (S9)	Nasenpolster	X	Nasenpolster ²	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Nasenpolster	X	Nasenpolster ²	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Nasenpolster ²	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
C-Series Tango™	N/V	X	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.					
S7™ Lightweight	N/V	X	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	N/V	X	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.					
S8 Escape™ II	N/V	X	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	N/V	X	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	Nasenpolster	X	Nasenpolster ²	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Nasenpolster	X	Nasenpolster ²	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Nasenpolster	X	Nasenpolster ²	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Nasenpolster	X	Nasenpolster ²	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Nasenpolster ²	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Nasenpolster ²	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
S9 VPAP™ Tx	Nasenpolster ³	X	Nasenpolster ²	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster

Gerät	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ Tx	N/V	X	NASENPOLSTER ²	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER
Stella™	N/V	X	NASENPOLSTER ^{1, 2}	NASENPOLSTER ¹	NASENPOLSTER ¹	NASENPOLSTER ¹	NASENPOLSTER ¹	NASENPOLSTER ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster

¹ SmartStop funktioniert möglicherweise nicht wie beschrieben, wenn diese Maske mit bestimmten CPAP- oder BiLevel-Geräten verwendet wird.

² Bei der Verwendung einer AirFit P10-Maske im BiLevel-Modus kann es zu einer Abnahme der Genauigkeit von Atemzug- und Atemminutenvolumen kommen, insbesondere bei höheren Druckunterstützungswerten.

³ Ohne PAC- und iVAPS-Modi. Nur für Druckbereich 4–25 cm H2O kompatibel.

⁴ Diese Kombination aus Maske und Gerät wurde auf der Grundlage der Bewertung der Genauigkeit der Überwachung von Druck, Volumen, Atemminutenvolumen und Atemfrequenz sowie gegebenenfalls der Alarme als sicher für die Anwendung eingestuft. Geringe Leistungsabweichungen können insbesondere bei höherem Druck oder Durchfluss beobachtet werden. Wie in der klinischen Praxis üblich, sollte die Wirksamkeit der Beatmung und der Alarme vom Arzt überprüft werden.

N/V = Die Maske wurde nicht für dieses Gerät validiert.

✓ = Kompatibel X = Nicht kompatibel



ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

Informationen zu weiteren Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter ResMed.com. Informationen über Patente und anderes geistiges Eigentum sind ResMed.com/ip zu entnehmen. AirSense, AirCurve, AirStart, AcuCare, Lumis, AirFit, AirTouch, AirMini, S9, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, AutoSet, Tango, S8, S8 AutoSet Vantage, S8 Escape, S8 Elite, S8 Compact, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Tx, Stellar, Mirage, Mirage Micro, Mirage Vista, Mirage Kidsta, Ultra Mirage, Activa, Pixi, Swift, Mirage Swift, Quattro, Astral, Escape, Adapt SV, Kidsta, Vista, VS Ultra, VS Integra, VS III und Papillon sind Marken und/oder registrierte Marken der ResMed Unternehmensfamilie © 2023 ResMed. 1017540/26 2023-11

