

Listă compatibilitate mască/dispozitiv

Română

Acest document specifică măștile compatibile cu dispozitivele ResMed cu suprapresiune și setarea măștii, dacă este necesară. Pentru detalii complete privind modul corect de utilizare a acestor dispozitive, consultați Ghidul utilizatorului specific fiecărui produs în parte.

Observație: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile.

Măști integrale pentru față

5.75	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față
Lumis™	N/V	N/V	Integrale pentru față ²	Integrale pentru față	Integrale pentru față	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Integrale pentru față	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față
S9 Escape™	N/V	Integrale pentru față	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ ¹	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Integrale pentru față	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Integrale pentru față	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față	Integrale pentru față
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V		Nu este necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.						
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V		Nu este necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.						
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V		Necesită calibrarea presiunii la 12 cm H2O. Consultați medicul și verificați ghidul utilizatorului.						
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V		Necesită calibrarea presiunii la 12 cm H2O. Consultați medicul și verificați ghidul utilizatorului.							

5.75	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V	Nu este necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ ¹	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Integralepentrufață	N/V	Integrale pentru față	Integralepentrufață	N/V	N/V	Integralepentrufață	Integralepentrufață	Integrale pentru față	Integralepentrufață	Integralepentrufață
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Integralepentrufață	N/V	Integrale pentru față	Integralepentrufață	N/V	N/V	Integralepentrufață	Integralepentrufață	Integrale pentru față	Integralepentrufață	Integralepentrufață
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Integralepentrufață	N/V	Integrale pentru față	Integralepentrufață	N/V	N/V	Integralepentrufață	Integralepentrufață	Integrale pentru față	Integralepentrufață	Integralepentrufață
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Integralepentrufață	N/V	Integrale pentru față	Integralepentrufață	N/V	N/V	Integralepentrufață	Integralepentrufață	Integrale pentru față	Integralepentrufață	Integralepentrufață
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integralepentrufață	N/V	N/V	Integralepentrufață	Integralepentrufață	Integrale pentru față	Integralepentrufață	Integralepentrufață
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	Integrale pentru față	Integralepentrufață	N/V	N/V	Integralepentrufață	Integralepentrufață	Integrale pentru față	Integralepentrufață	Integralepentrufață
S9 VPAP™ Tx	N/V	Integralepentrufață ²	N/V	Integrale pentru față	Integralepentrufață	N/V	N/V	Integralepentrufață	Integralepentrufață	Integrale pentru față	Integralepentrufață	Integralepentrufață
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	N/V	N/V	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ
Stellar™	N/V	N/V	N/V	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	N/V	N/V	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	N/V	N/V	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	N/V	N/V	N/V	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALE PENTRU FAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ	INTEGRALEPENTRUFAȚĂ

¹ Este posibil ca SmartStop să nu funcționeze conform descrierii atunci când utilizați această mască împreună cu anumite dispozitive CPAP sau cu nivel dublu.

² Cu excepția modurilor PAC și iVAPS. Compatibil doar pentru intervalul de presiune 4-25 cm H2O.

³ Eficacitatea tratamentului poate fi afectată în zone precum precizia comenzii și AutoEPAP, în special la presiuni mai ridicate.

Atenție: Trebuie verificată eficiența ventilației și alarmelor, inclusiv după orice modificare a setării de ventilație și alarmelor, după configurarea circuitului sau după tratamentul asociat (de ex., nebulizare, fluxul de oxigen)

N/V = Masca nu a fost validată pentru acest dispozitiv.

✓ = Compatibil X = Incompatibil

Măști nazale 1

Dispozitiv	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Nazalepentruspitale
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal

Dispozitiv	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Nazalpentruspitale
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
Lumis™	X	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
S9 Escape™	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Nuestene necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Nuestene necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Necesită calibrarea presiunii la 12 cm H2O. Consultați medicul și verificați ghidul utilizatorului.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	Necesită calibrarea presiunii la 12 cm H2O. Consultați medicul și verificați ghidul utilizatorului.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Nu este necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
S9 VPAP™ Tx	X	Pernițe ²	N/V	Pernițe	N/V	Pernițe	Pernițe	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	PERNIȚE	PERNIȚE	NAZAL	NAZAL	NAZAL	NAZAL
Stellar™	X	N/V	PERNIȚE	PERNIȚE	PERNIȚE	PERNIȚE ¹	PERNIȚE ¹	NAZAL	NAZAL	NAZAL	NAZAL
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

Dispozitiv	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Nazalepentruspitale
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	N/V	N/V	Nazal	N/V	Nazal	Nazal

¹ Este posibil ca SmartStop să nu funcționeze conform descrierii atunci când utilizați această mască împreună cu anumite dispozitive CPAP sau cu nivel dublu.

² Cu excepția modurilor PAC și iVAPS. Compatibil doar pentru intervalul de presiune 4-25 cm H2O.

N/V = Masca nu a fost validată pentru acest dispozitiv.

✓ = Compatibil X = Incompatibil

Măști nazale 2

Dispozitiv	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal	N/V	Nazal	N/V	N/V	Nazal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal	N/V	Nazal	N/V	N/V	Nazal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal	N/V	Nazal	N/V	N/V	Nazal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal	N/V	Nazal	N/V	N/V	Nazal
Lumis™	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal	N/V	Nazal	N/V	N/V	Nazal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Nazal	Nazal	Nazal Ultra	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
S9 Escape™	N/V	N/V	Nazal	Nazal	Nazal Ultra	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Nazal	Nazal	Nazal Ultra	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nazal	Nazal	Nazal Ultra	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	Nu este necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.						N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	Nu este necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V	Necesită calibrarea presiunii la 12 cm H2O. Consultați medicul și verificați ghidul utilizatorului.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	Necesită calibrarea presiunii la 12 cm H2O. Consultați medicul și verificați ghidul utilizatorului.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V	Nu este necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Nazal	Nazal	Nazal Ultra	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal

Dispozitiv	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nazal	Nazal	Nazal Ultra	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Nazal	Nazal	Nazal Ultra	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pediatric	N/V	Nazal	Nazal	Nazal Ultra	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pediatric	N/V	Nazal	Nazal	Nazal Ultra	N/V	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal
S9 VPAP™ Tx	Pediatric	N/V	Nazal	Nazal	Nazal Ultra	N/V	Nazal	N/V	N/V	Nazal
VPAP™ Tx	N/V	NAZAL	NAZAL	NAZAL	NAZAL-ULTRA	N/V	NAZAL	N/V	N/V	NAZAL
Stellar™	Pediatric	NAZAL	NAZAL	NAZAL	ULTRA	N/V	NAZAL	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Pediatric	Nazal	Nazal	Nazal	Nazal Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = Masca nu a fost validată pentru acest dispozitiv.

✓ = Compatibil X = Incompatibil

Pernițe nazale

Dispozitiv	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Pernițe	X	Pernițe ²	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Pernițe	X	Pernițe ²	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Pernițe	X	Pernițe ²	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Pernițe ²	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	
Lumis™	N/V	X	Pernițe ²	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Pernițe	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	
S9 Escape™	Pernițe	X	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
AutoSet CS™ (S9)	Pernițe	X	Pernițe ²	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Pernițe	X	Pernițe ²	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Pernițe ²	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	
C-Series Tango™	N/V	X		Nu este necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.					
S7™ Lightweight	N/V	X		Nu este necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	

Dispozitiv	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	N/V	X		Necesită calibrarea presiunii la 12 cm H2O. Consultați medicul și verificați ghidul utilizatorului.				
S8 Escape™ II	N/V	X		Necesită calibrarea presiunii la 12 cm H2O. Consultați medicul și verificați ghidul utilizatorului.				
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	N/V	X		Nu este necesară nicio setare. Consultați medicul înainte de a schimba cu un tip diferit de mască.				
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	Pernițe	X	Pernițe ²	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Pernițe	X	Pernițe ²	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Pernițe	X	Pernițe ²	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Pernițe	X	Pernițe ²	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Pernițe ²	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Pernițe ²	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe
S9 VPAP™ Tx	Pernițe ³	X	Pernițe ²	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe
VPAP™ Tx	N/V	X	PERNIȚE ²	PERNIȚE	PERNIȚE	PERNIȚE	PERNIȚE	PERNIȚE
Stellar™	N/V	X	PERNIȚE ^{1, 2}	PERNIȚE ¹	PERNIȚE ¹	PERNIȚE ¹	PERNIȚE ¹	PERNIȚE ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe	Pernițe

¹ Este posibil ca SmartStop să nu funcționeze conform descrierii atunci când utilizați această mască împreună cu anumite dispozitive CPAP sau cu nivel dublu.

² Precizia volumului fluxului/ventilației pe minut se poate reduce atunci când utilizați masca AirFit P10 în moduri cu nivel dublu, în special în medii cu presiuni mai ridicate.

³ Cu excepția modurilor PAC și iVAPS. Compatibil doar pentru intervalul de presiune 4-25 cm H2O.

N/V = Masca nu a fost validată pentru acest dispozitiv.

✓ = Compatibil X = Incompatibil