

Anpassungsleitfaden für AcuCare-Masken



- Verwenden Sie die Schablone (Abbildung abweichend) auf der Verpackung, um die korrekte Maskengröße zu bestimmen.



- Starten Sie die Beatmung gemäß den Anweisungen des Beatmungsgeräts.
- Setzen Sie das Maskenkissen über Nase und Mund.



- Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf während Sie die Maske ans Gesicht halten. Ziehen Sie die seitlichen Bänder, unterhalb der Ohren verlaufend, nach hinten. Die Seitenstege der Maske sollten sich beim Straffen der Bänder nach hinten biegen.



- Passen Sie vorsichtig das obere Band an.



- Stellen Sie sicher, dass die Maske richtig sitzt und die Kopfbänder nicht zu fest angezogen sind.



- Wenn um das Maskenkissen herum Luft austritt, richten Sie die Maske neu auf dem Gesicht aus, um eine bessere Dichtigkeit zu erzielen. Passen Sie gegebenenfalls die Kopfbänder neu an.

Tipps: Die Bänder nicht zu fest anziehen; das doppelwandige Maskenkissen ist luftgefüllt und bietet eine komfortable Dichtigkeit. Die beste Dichtigkeit wird erzielt, wenn die seitlichen Bänder straffer sind als das obere Band.

Hinweis: Diese Anweisungen zur Anpassung gelten für alle Masken der AcuCare-Reihe. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Gebrauchsanweisung zur jeweiligen Maske.

Artikelnummern

AcuCare F1-0 NV FFM Small (20-Stück)	60759	AcuCare F1-1 NV+AAV FFM Small (20-Stück)	60762	AcuCare F1-4 Vented FFM Small (20-Stück)	60765
AcuCare F1-0 NV FFM Medium (20-Stück)	60760	AcuCare F1-1 NV+AAV FFM Medium (20-Stück)	60763	AcuCare F1-4 Vented FFM Medium (20-Stück)	60766
AcuCare F1-0 NV FFM Large (20-Stück)	60761	AcuCare F1-1 NV+AAV FFM Large (20-Stück)	60764	AcuCare F1-4 Vented FFM Large (20-Stück)	60767