

## Tipps für die Anpassung der Quattro Air



- Drücken Sie auf die seitlichen Laschen des Kniestücks und ziehen Sie dieses von der Maske ab.
- Öffnen Sie die unteren Bänder der Maske, positionieren Sie den unteren Rand des Maskenpolsters in der Kinnfalte und legen Sie die Maske über die Nase. Ziehen Sie das obere Kopfband über den Kopf.



- Ziehen Sie die beiden Bänder des oberen Kopfbandes gleichmäßig an, bis die Maske fest sitzt.



- Führen Sie die unteren Bänder unter Ihren Ohren entlang und hängen Sie sie in die Haken unten am Maskenrahmen ein.



- Ziehen Sie die unteren Kopfbänder gleichmäßig an, bis die Maske gut sitzt.
- Die Maske sollte bequem, aber fest und sicher sitzen.
- Die Bänder nicht zu fest anziehen!



- Verbinden Sie das Kniestück mit dem Atemschlauch. Bringen Sie es an der Maske an, indem Sie die seitlichen Laschen drücken und es in den Maskenkörper drücken.
- Schalten Sie das Atemtherapiegerät ein.
- Nehmen Sie im Liegen Feinanpassungen vor, wenn dies erforderlich ist.



- Sie können die Maske etwas vom Gesicht abheben, lassen Sie sie dann wieder leicht auf das Gesicht zurückfallen. Achten Sie darauf, dass der untere Polsterrand in der Kinnfalte aufliegt.
- Öffnen Sie die oberen Klettverschlüsse und justieren Sie die oberen Kopfbänder gleichmäßig, bis die Maske dicht sitzt. Schließen Sie dann die Klettverschlüsse.
- Ihre Maske ist jetzt einsatzbereit.

## Tipps

- Achten Sie beim Anpassen der Maske darauf, dass der untere Rand des Polsters in der Kinnfalte aufliegt. Positionieren Sie dann die Maske nach oben über die Nase des Patienten.
- Achten Sie darauf, die Kopfbänder nicht zu straff anzuziehen.
- Heben Sie bei eingeschaltetem Gebläse das Maskenpolster leicht vom Gesicht des Patienten ab und setzen Sie es dann wieder auf, sodass sich das Polster richtig entfalten kann.




## Tipps zur Größenbestimmung und Anpassung der Quattro™ Air Maske

**Quattro Air der leichtere Weg zu besserem Schlaf:** Die Quattro Air Maske ist die neue, extra-leichte Full Face Maske von ResMed, die auf der bewährten Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit der Mirage Quattro™ aufbaut. Sie bietet Ihren Patienten verbesserten Komfort und noch höhere Benutzerfreundlichkeit und ist dabei 45% leichter<sup>1</sup> als die beliebte Mirage Quattro Maske.



## Tipps zur Größenbestimmung der Quattro Air

Zur Bestimmung der Maskengröße für die Quattro Air wird der untere Rand der Anpassungsschablone an der Kinnfalte ausgerichtet. Empfohlen wird die Größe auf der Schablone, die sich auf Höhe des inneren Augenwinkels befindet. Verwenden Sie diese Anpassungsschablone als Orientierungshilfe, um die korrekte Maskengröße der Quattro Air für Ihre Patienten zu ermitteln.

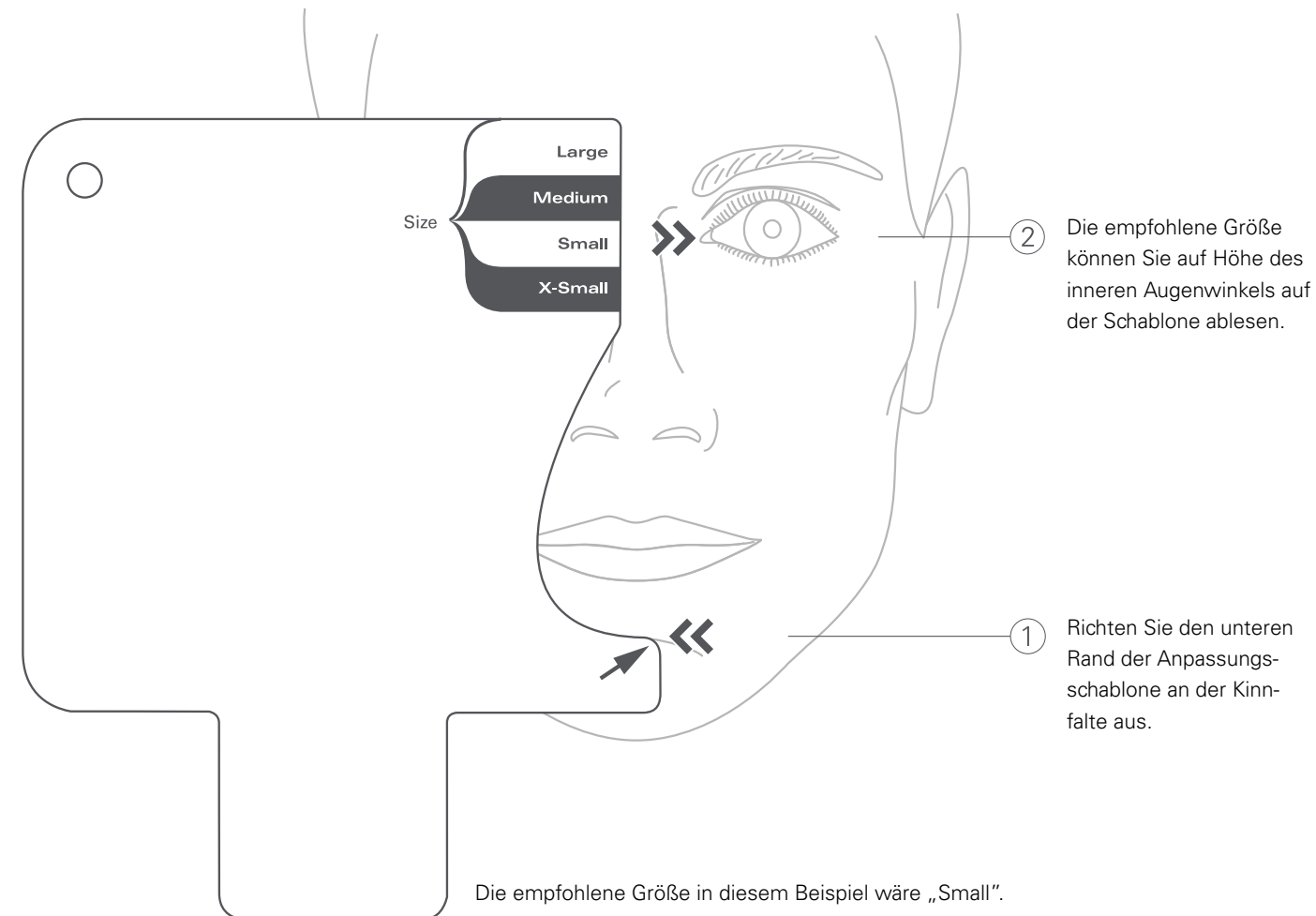

## Optimale Position des Maskenpolsters\*

Sowohl Quattro Air als auch Quattro™ FX Masken liegen weiter unten als die Mirage Quattro auf dem Nasenrücken auf. Dadurch ist die Sicht für die Patienten besser. Durch die tiefere Position des abdichtenden Bereichs wird außerdem der besonders empfindliche obere Teil des Nasenrückens entlastet.




Die **Mirage Quattro** liegt ganz oben auf der Nase auf, dort, wo die Einbuchtung am tiefsten ist (Nasenwurzel).



Die **Quattro Air** liegt in Augenhöhe auf der Nase auf, also zwischen der Position der Mirage Quattro und Quattro FX.



Die **Quattro FX** liegt unterhalb der Augenhöhe auf der Nase auf, d. h. weiter unten als die anderen Full Face Masken von ResMed.

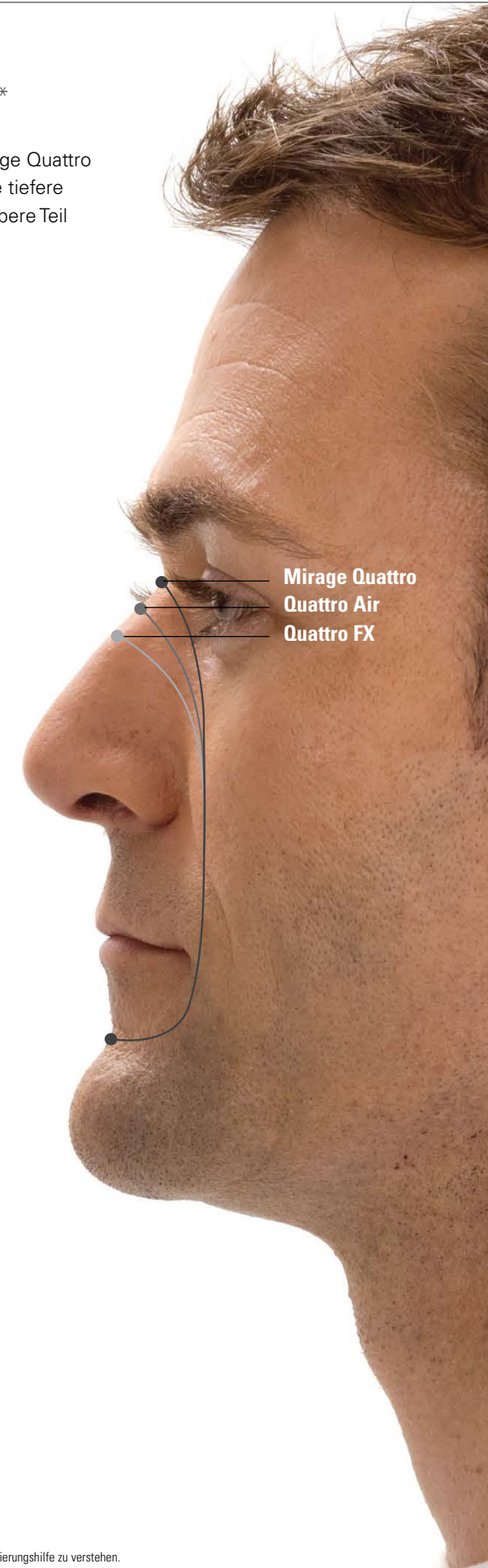

Mirage Quattro  
Quattro Air  
Quattro FX

## Nützliche Information

- Die Quattro Air wirkt kleiner als die Mirage Quattro; bei den meisten Patienten können aber die gleichen Polstergrößen wie zuvor verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass bei der Größenbestimmung der Mund des Patienten geschlossen und entspannt ist.

<sup>1</sup> Die Quattro Air der Größe M ist 45% leichter als die Mirage Quattro der Größe M.

\* Bei den oben dargestellten Maskenpositionen handelt es sich um annähernde Angaben, die für die meisten Patienten gelten. Sie sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen. Umfassende Anweisungen zur Anpassung finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.